

# 江西安贝医用显微镜保护套（带镜头）

产品名称	江西安贝医用显微镜保护套（带镜头）
公司名称	江西安贝医用制品有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:江西安贝 型号:显微镜套 有效期:三年
公司地址	江西省南昌市青山湖区湖坊工贸城一期B5二楼
联系电话	020-36536840 013320114549

## 产品详情

### 无菌技术灭菌保护套

随着外科手术的迅速发展，新型手术仪器设备推广应用，而一些仪器设备需连接相应的导线后方可使用。如何快速、有效的将导线套上灭菌保护套，且与灭菌的器械相连，以保证手术顺利开展，成为手术室器械准备的重要环节之一。传统的方法是在套入之以双手大拇指及手腕用力将紧贴的保护套松解分开，但分开后双手都感到酸痛，而且操作效率低。在实践中摸索出一新的整理方法。此方法是以整左手负重，右手协助将保护套分开，既简单易学，操作起来又非常省力。

现介绍如下。

- 1、取下显微镜保护套、镜头盖。
- 2、放松底座的刹车装置，收拢各节横臂，旋紧制动手轮，推至手术床边。
- 3、插上电源插座，接通电源，再开显微镜开关，检查功能是否正常，灯亮即可。
- 4、用无菌透明保护套把显微镜的镜头及前臂包好，再将保护套上镜头套在物镜上，尽量套紧，防止光源给镜片造成反光点。再把保护镜头两边松紧带找寻任向上的两点位挂上。

- 5、 把要使用的主目镜及副目镜套好，撕开不干胶固定好位子。把另一边不用的收起。
- 6、 用镜套上带的两个腰条把机身收紧，撕开不干胶固定好。
- 7、 根据手术部位安放显微镜，满意后将底座的刹车刹牢并将各制动轮旋紧。
- 8、 手术开始，协助术者调节镜头至功能位，只需扭动横臂上的黑色钮，光源的调节应从最小的亮度开始，调至合适；根据术者的瞳距和眼睛的屈光度进行调节，再调物镜焦距达最大清晰度。
- 9、 手术结束，巡回护士先关显微镜开关，最后撤离电源，扣上镜头盖，套上显微镜保护套，整理归位。

#### 注意事项：

- 1、 在手术过程中，如手术器械碰到保护套镜头的镜片，不要去擦拭镜片，防止影响镜片的透明度。
- 2、 显微镜应防止震动和撞击，应固定手术间，避免反复移动。套显微镜保护套时必须2人同步操作，按无菌物品操作手册执行。
- 3、 使用完毕，透镜表面定期用脱脂棉蘸无水酒精擦拭，保持干净。用显微镜保护套套住显微镜，保持光学系统的清洁。

本产品为一次性医用产品，其主要用于需要无菌隔离保护的医疗器械及医疗用品的防护。主要材质为进口聚乙烯薄膜。该产品系无菌包装，术前将其直接套在导线或仪器上，可充分保证术部无菌环境。术后一次性清除，具有方便、清洁减少了医务人员的工作强度的优点，有效节约了仪器维护及导线更换的开支。无菌保护套是由复合纸塑袋包装并密封的产品，经环氧乙烷灭菌处理，并经各项性能检测合格后，供应给医疗单位或个人使用。灭菌后无菌保护套后作为无菌产品，只限于一次使用，用后应予以销毁。江西安贝手术显微镜保护套是莱卡、蔡司、目乐都可通用的，其规格有250 × 120,300 × 120，200 × 120等。