

# 中脉远红外养生能量护腰 远红发热

产品名称	中脉远红外养生能量护腰 远红发热
公司名称	南京华脉医疗器械股份有限公司
价格	980.00/盒
规格参数	品牌:华脉 型号:加热型 面料:日本进口弹力OK布
公司地址	南京市浦口经济开发区浦珠路8号
联系电话	86-02566608328 13815875643

## 产品详情

### 产品介绍

本品由国际高级运动护具首选面料：日本优质弹力ok布，“会呼吸的材料”西班牙透气乳胶等材料复合而成，所用发热膜获国内发明专利，采用柔性远红外面状发热技术，具有舒适、保健、智能安全、使用寿命长等特点，是国内外领先的远红外发热产品。

柔性远红外发热膜是新一代创新型主动远红外保健材料，经国家权威部门鉴定，其发射的远红外波长恒定在8-14  $\mu\text{m}$ ，是人体所必须的“生命之光”。

### 产品特点

1. 产品工作时发出特定波长（8-14  $\mu\text{m}$ ）的远红外线，并产生温度柔和的热量，具有活化水分子、提高身体的含氧量、刺激穴位、疏通经络、促进身体新陈代谢、调节神经系统等作用；
2. 产品采用智能控制系统，使得热量散发均匀、温度可调，节能、安全，最高温度为45℃，不灼伤；
3. 供电方式安全、便捷。产品热启动迅速，且自动恒温。

### 适用范围

护腰、暖腰、护肾、暖胃，还可连续释放远红外，给人体带来微电流的热电刺激效应，促进相关部位血液循环。

## 使用说明

1、将远红外能量护腰固定在人体合适位置，可根据个人体型调节松紧；

2、将控制器接通ac220v电源；

3、使用时，长按“开关”键3s，控制器打开，指示灯点亮；

长按“温度”键3s，进入温度设置模式，此时，按上下箭头设定合适的温度（“↑”为温度加、“↓”为温度减，可调节5档）；

长按“定时”键3s，进入定时设置模式，此时按上下箭设定合适的时间（“↑”为时间加、“↓”为时间减，1档时间为1小时，可调节15档）。

4、长按“开关”键停止工作、指示灯灭。

## 注意事项

1. 如皮肤出现灼热疼痛感觉，应调低温度或停止使用；

2. 禁止用力拉扯护具出线口和电源线与控制器结合部；

3. 避免放置于过热（超过60℃）或潮湿的环境中。

## 产品禁忌

1. 孕妇、有严重脑疾病及出血倾向者禁用；

2. 高热、温度感觉障碍及佩戴部位皮肤破损者禁用；

3. 体内装有心脏起搏器等电子设备或体内有金属类支架者禁用；

4. 神经系统疾病患者、皮肤病患者、以及皮肤热敏感度低者不宜使用。

