

# 婴儿全身静脉穿刺训练模型人，小儿静脉穿刺训练模型

产品名称	婴儿全身静脉穿刺训练模型人，小儿静脉穿刺训练模型
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH-130-1
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

## 产品详情

产品名称：高级婴儿全身静脉穿刺训练模型 型号：zh-130-1

产品型号：zh-130-1

### 一、模型特点：

该模型是我公司最新开发研制，根据标准出生婴儿造型，依照解剖结构为标准，将婴儿头部、上肢、下肢及脐部的全身主要静脉进行布局。实行全身主要静脉的穿刺、输液、抽血等功能操作训练。本模型采用进口塑胶材料，由不锈钢模具浇注制成。具有形象逼真，操作真实，经久耐用等特点。是目前临床基础护理技能训练的理想产品。

### 二、产品主要功能特点

1、婴儿全身静脉主要分布为头颈部静脉；左右臂及手部的静脉；脐带部的静脉；；右腿的大隐静脉，小隐静脉等。可进行全身主要静脉的穿刺，输液（血），抽血等功能操作训练。

2、臀部肌肉注射练习。

3、鼻和口可进行鼻饲管、胃管的插管练习等操作。

4、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。

5、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位，可经受反复穿刺。

### 三、使用方法

1、在输液架上挂有200至300毫升的模拟血液袋，与模型头部的乳胶管相连接，使模拟血液注入模型的管道系统内，夹紧右下肢足部乳胶管和脐带口，构成全身主要静脉的血液循环。右下肢乳胶管需连接废液袋（塑料转移袋）。2、重返所需部位的静脉采用5毫升注射器穿刺静脉，抽取静脉血液。

3、选择所需部位的静脉将装有药液的5毫升注射器穿刺静脉，推注入静脉内。

4、在输液架上挂上输液包，用头皮针进行静脉穿刺，进行输液操作。

### 四、保养、保修

1、保持模型清洁，操作训练结束后，应将模型擦拭干净。

2、操作训练结束后，必须排干模型肉摊静脉管道系统的残留液体，以防乳胶管道系统的老化。

3、长时间不用时，应将模型装箱存放在通风、阴凉干燥处，以延长使用寿命。

4、本模型在购买日期一年内或合同规定的保修期内，若发生任何因制造工艺或原件（除人为造成外）的故障等质量问题，本公司负责免费维修服务，并承诺终身维护，费用用户自负。

上海中弘公司专业生产“zhonghong中弘科教”品牌护理技能训练模型,以造型逼真,工艺标准,质量先进等优点,产品作为各大医学,卫生,护士院校,医学指定推荐使用产品,欢迎阁下致电021-64049756/64049758或登陆中弘医学模型网站<http://www.shzhonghong.com>了解更多!