

内窥镜清洗槽医用胃镜肠镜支气管镜耳鼻喉镜清洗槽

产品名称	内窥镜清洗槽医用胃镜肠镜支气管镜耳鼻喉镜清洗槽
公司名称	海陵区恒企医疗器械经营部
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 机器类型:清洗槽 用途:医用
公司地址	江苏泰州市海陵区泰东大转盘
联系电话	86 0523 86187082 15295210485

产品详情

一、常用规格

名称	槽(数量)	外型尺寸(cm)	内径尺寸(cm)
胃镜清洗消毒槽	四槽	153 × 49 × 80	140
胃镜清洗消毒槽	五槽	153 × 59 × 80	140
肠镜清洗消毒槽	四槽	183 × 49 × 80	170
肠镜清洗消毒槽	五槽	183 × 59 × 80	170
气管镜清洗消毒槽	四槽	115 × 49 × 80	100
气管镜清洗消毒槽	五槽	115 × 59 × 80	100
腹腔镜清洗消毒槽	四槽	80 × 65 × 80	70
腹腔镜清洗消毒槽	五槽	100 × 65 × 80	70

二、功能与配置

1.航空有机玻璃柔韧性好，不易损伤镜体。2.使用方便，易操作，每个槽的进水口都装有abs开关球阀。3.消毒槽、浸泡槽带有密封盖，防止消毒液挥发影响消毒效果。4.消毒槽、浸泡槽出水口装有abs开关球阀，方便浸泡及排放。

5.可接驳内窥镜清洗高压水枪四、清洗步骤

四槽洗法：流水洗—酶洗—浸泡消毒(2%碱性戊二醛)—冲洗(喷洒)

五槽洗法：流水洗—酶洗—清洗—浸泡消毒(2%碱性戊二醛)—冲洗(喷洒)

胃镜、肠镜、十二指肠镜浸泡：不少于10分钟；

支气管镜、喉镜浸泡不少于20分钟；

结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后的内镜浸泡不少于 45 分钟。

清洗方法和要求详见《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》

三、应用范围

适用于医院窥镜中心、手术室等科室清洗和消毒胃镜、肠镜、气管镜、胆道镜、宫腔镜等多种内窥镜。

四、清洗步骤

四槽洗法：流水洗—酶洗—浸泡消毒(2%碱性戊二醛)—冲洗(喷洒)

五槽洗法：流水洗—酶洗—清洗—浸泡消毒(2%碱性戊二醛)—冲洗(喷洒)

胃镜、肠镜、十二指肠镜浸泡：不少于10分钟；

支气管镜、喉镜浸泡不少于20分钟；

结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后的内镜浸泡不少于 45 分钟。

清洗方法和要求详见《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》

本厂专业生产，如有需要请随时电联销售部陈经理：15295210485！

本产品的加工定制是是，机器类型是清洗槽，用途是医用，原理是蒸汽，品牌是恒企，工作频率是0，型号是亚克力，工作电压是·（伏），功率是0（瓦）