

雅培艾滋（HIV）检测试纸

产品名称	雅培艾滋（HIV）检测试纸
公司名称	上海亿股实业有限公司
价格	68.00/个
规格参数	品牌:雅培 型号:YP001
公司地址	浦东新区书院镇丽正路1628号4幢3838室
联系电话	18616384296

产品详情

雅培试纸原包装100人份，分装后我们配有采血针，采血管，酒精棉，分装的缓冲液及说明书，很方便个人自检，隐私保密发货，备货足，当天拍下当天发货。量大价更优，咨询电话：13391338135

雅培试纸常见问题(1) 雅培试纸准吗？有什么特点？

雅培试纸是血检试纸，灵敏度100%，特异性99.87%，单次检测结果的准确率在99%以上，若两次以上结果相同，则100%准确。

雅培试纸是目前唯一在国内广泛使用的进口艾滋病检测试纸，可通过全血、血浆、血清检测hiv-1和hiv-2型抗体，操作方便、15分钟即可获得结果，检测结果准确、稳定，被全球众多医疗机构和疾控中心采用。

(2) 艾滋病检测试纸及缓冲液有毒吗？

艾滋病检测试纸及缓冲液都是安全的。试纸的抗原是重组抗原，这点原装说明书中已有说明，若不小心接触到手、伤口，口、鼻、眼，不会造成伤害。缓冲液为防菌剂，无毒害作用。

检测完毕后请妥善处理废弃物，特别是阳性结果，应对废弃物消毒烧毁，以免对他人造成伤害。预防艾滋，人人有责。

(3) 雅培试纸的抗干扰能力怎么样？如何判断是否检测成功？

雅培试纸是hiv抗体检测试纸，抗体检测不受身体状态、日常用药(如感冒药、消炎药等，但抗hiv病毒除外)、餐饮等影响，因此抗干扰能力很强。

质控区，顾名思义就是质量控制，质控区的埋包线变红，则表明走液正常且检测成功，在不加样品(全血/血清/血浆)的情况下，质控区的埋包线不会变红。

(4) 为什么雅培试纸的检测区或质控区会有印迹、纹迹？

正常情况下，加样后会在检测区和质控区看到走液迹象，呈浅红色丝状，随着时间的推移，15分钟后试纸的检测区和质控区会变的洁净，仅留下清晰的质控线或检测线(规则的红杠)。若质控区或检测区出现不规则的印迹、纹迹，一般情况下是因为加血过多或试纸受到物理损坏造成的，因此检测完成前，请不要大幅弯曲、折叠试纸，同时加血时，以染红浸透加样区为准，待血珠渗入加样区后，再滴加缓冲液。

若试纸的检测区或质控区出现印迹、纹迹，但质控区亮有红线，说明检测结果是有效的。

(5) 为什么有时雅培试纸的检测区会有暗印、淡红线、白杠呢？

据了解，有时候雅培的检测区会出现暗印或淡红线，在近距离、特别是侧面仔细观察时会发现暗印或淡红线，正面一臂远距离则较难发现。

除此之外，有时检测结果试纸条整体呈淡红色，但检测区的埋包线却是白色。

出现以上情况，原因可能如下：

(a) 加血过多，导致试纸的含液量饱和。加血量以染红浸透加样区的反应垫为宜。

(b) 检测完毕后，过了很长时间再次查看。雅培试纸的检测结果应在加血后的15-60分钟之间读取，超过60分钟则不再有效，同时检测区也有可能发生变化。

(c) 缓冲液问题。全血检测时，雅培试纸应使用同批次的配套缓冲液，不可使用其它批次或艾康等缓冲液。因此建议选择购买雅培艾滋病检测试纸，更有保障。

(d) 操作问题。加血后，应等待血珠渗入反应垫后再滴加缓冲液。

(6) 雅培试纸有单人份包装吗？

雅培试纸暂无单人份包装，包装规格为每包100人份，分为10片，每片10人份连在一起，方便血站等环境批量检测，同时也可剪成单人份，适用更多检测环境。

撕开雅培试纸保护层后，会看到一个随机的字母，如3a、6a等，多份、多次检测时，可用于区分试纸。同时雅培试纸也可方便的使用记号笔、铅笔等书写日期等标记。

(7) 如何查看雅培试纸的有效期？

从上面的图片中我们可以发现，每片(10人份)上面印有批号与有效期，裁剪成单人份后将只有其中1份可以看到有效期。

关于有效期，我们会公布展示给大家。

(8) 雅培试纸如何贮藏？

雅培试纸的贮藏条件为2-30℃，春秋季节放于抽屉即可。冬夏季应不破坏我们提供的包装情况下，用报纸包裹后放入冰箱，温度控制在2-30℃。

(9) 雅培试纸有防伪查询吗？

目前雅培、艾康、爱卫等试纸均没有提供防伪查询，网上出现的防伪标签，纯属个别商家自己动了手脚，将与试纸毫无关系的山寨防伪标签粘上，带有欺骗性质。

雅培试纸日本原产，全球流通，艾康试纸杭州产、爱卫北京产，厂家各不相同，不可能提供统一防伪，更不可能提供本地化的防伪。另外血检试纸主要供应医疗机构，不存在防伪一说。

(10)全血检测，不加缓冲液影响结果吗？

全血检测，不管是静脉血还是手指血，都需要加缓冲液，否则可能会得不到正确的结果，缓冲液具有稀释、防菌等作用。

通过血清、血浆检测时，不需要加缓冲液。

(11) 雅培和艾康的缓冲液是一样的吗？可以混着用吗？缓冲液有什么作用？

雅培和艾康的缓冲液并不一样，不可以混着使用。很多人会同时购买雅培和艾康试纸，如果是同时检测，应区分开缓冲液。艾友网提供的雅培缓冲液是用独立铝铂袋包装的，艾康缓冲液则用独立透明袋包装着，并且贴有文字标识，很容易区分。

缓冲液的主要作用是抗微生物、防菌、稀释、加速走液。

(12) 什么情况下会造成雅培试纸检测失败？

雅培试纸工艺成熟，性能稳定，按要求操作，不会出现检测失败的情况。

造成检测失败的原因，主要是加血量引起的。

如果加血过多，会把试纸全部染红，造成无法判断结果。

如果加血过少，则血液无法从加样区爬行至质控区，造成没有红线。

雅培试纸走液较慢，加血时应保证加样区被血液染红浸透，然后滴加1-2滴缓冲液，约1-2分钟会在检测区和质控区看见走液迹象。

(13) 目前雅培试纸是第几代？

目前艾友网所售的雅培试纸是第三代的，可检测hiv-1/2型抗体。

据报道，雅培第四代hiv检测试纸已经通过美国fda认证，有2个检测区，分别可检测hiv-1/2型抗体与p24抗原，窗口期将平均缩短5天，目前未上市。

(14) 为什么雅培试纸会有绿色(determine)和红色(alere determine)两种外观？

绿色(determine)试纸为雅培试纸，现雅培全系列诊断类产品已被alere公司收购，名称改为alere determine，同时外包装改为印有alere logo的红色包装。

因此绿色(determine)试纸已不存在，现在全部是红色(alere determine)试纸。

(15) 恐艾后我很敏感，不放心你们提供的采血针等配件怎么办？

为了方便大家检测，我们配备了检测所需要的配件，有无痛采血针、手动采血针、酒精棉、吸管、说明书。

不管是无痛采血针还是手动采血针，针帽和钢针都是一体的，不仅仅是安全卫生，更具有防菌的作用。

针帽拧下来后，不可还原，为一次性产品，因此不必担心被重复使用。

酒精棉片也是独立包装，撕开使用后无法重复使用。

吸管为全新的吸管，艾康的独立包装中，厂家配有一根吸管。

如果你仍然不放心配件，可自行去药店购买。

(16) 如果感染艾滋病，多长时间可以测出来？高危后，多长时间可以排除？

一般情况下，感染后3-5周就可以检测出来。

但高危后排除，却是一件让人头疼的问题。因为窗口期因人而异，不同的国家，不同的组织、不同的专家，举张的窗口期时间也不同，乐观派举张2-6周，保守派举张3个月，也有少部份人举张6个月甚至更长的。目前我国疾控中心(cdc)为保险起见，举张窗口期为3个月。根据我们的经验，6周后排除的机率在99%以上，三个月则可以100%的排除。

很多人因为那1%不确定的机率而非常纠结，甚至有时弄的我们也很苦恼，但我想，为何不因99%的机率而喜悦，偏纠结于1%的机率而烦恼呢？

(17) 雅培试纸检测出阳性(2条红线)，怎么办？

雅培试纸是初筛检测产品，如检测结果是阳性，应去医院或疾控中心确证。

初筛为阳性者，并不代表就一定感染了艾滋病。

(18) 确定感染了艾滋病，还能活多久？

尽管这个问题与产品无关，但它仍然是大家关心的热门问题。

目前来说，感染hiv后如果不治疗，潜伏期是8-10年，之后就发展为艾滋病人，最终死亡。但持续进行抗病毒治疗，则可以长期处在无症状期，甚至与正常人的寿命一样。

另外，不久的将来，艾滋病的预防与治疗一定会有大的突破，甚至完全治愈。

本产品的品牌是雅培，型号是YP001