

高级多功能急救护理训练模拟人

产品名称	高级多功能急救护理训练模拟人
公司名称	上海康谊医学教学仪器设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:康谊牌 型号:KAY/ALS800
公司地址	上海市闵行区万源路788弄32号
联系电话	021-62760599 13601610901

产品详情

产品型号：kay/als800

产品价格：15000产品概述：全面执行2010国际最新心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准

高级多功能急救护理训练模拟人的描述：

kay/als800 高级多功能急救护理训练模拟人（心肺复苏、基础护理二合一）

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准 心肺复苏功能操作：
大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、矩形图表数据统计
人工手位胸外按压时：1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域) 由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度。 2、液晶计数显示；详细记录按压错误的具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。
3、矩形图表数据统计：按压正确、按压力量过大、按压力量不足、按压正确等详细图表统计显示

4、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的各种原因，以便训练者及时改正。

模拟标准气道开放； 人工口对口呼吸(吹气)时： 1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的各种原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3、矩形图表数据统计：吹气力量过大、吹气力量不足、吹气正确等详细矩形图表统计显示

4、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的各种原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 操作方式：训练操作；普及考核、专业考核。

操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长、短条成绩单。 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

基础护理操作： 洗头、洗脸 手臂静脉穿刺、注射输液（血） 三角肌注射

股外肌注射 灌肠法 男、女导尿术 男、女膀胱冲洗

整体护理：擦洗、穿换衣服 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具； 高级电脑大屏幕液晶显示器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置四套； 可换面皮二只； 热敏打印纸五卷；

2010国际最新操作指南光盘一盘； 现场急救常用技术使用手册一本；

使用说明书一本； 保修卡、合格证。