

# 大屏幕液晶彩显高级全自动电脑心肺复苏模拟人

产品名称	大屏幕液晶彩显高级全自动电脑心肺复苏模拟人
公司名称	上海康谊医学教学仪器设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:康谊牌 型号: KAY/CPR680
公司地址	上海市闵行区万源路788弄32号
联系电话	021-62760599 13601610901

## 产品详情

产品型号：kay/cpr680

产品价格：12800  
产品概述：康谊牌kay系列心肺复苏模拟人:国家卫生部、中华医学会、中国工程师协会、中国红十字会指定推荐使用产品 心肺复苏术，国际用语：cardiopulmonary resuscitation. 简称：cpr。骤停（如心脏疾病、心肌梗塞、触电、溺水、中毒、矿难、高空作业交通事故、旅游意外、自然灾害、意外事故等所造成的心脏骤停），而现场第一目击者采取呼救、心肺复苏术等紧急求助措施。采取现场心肺复苏术，2010国际最新操作标准：c胸外按压 a开放气道 b人工呼吸，替代原来2005的cpr操作顺序（a、b、c三大步骤：即a—气道开放。b—人工呼吸。c—胸外按压），有条件可采取d—自动体外除颤。而现场抢救人员，必须要规范标准进行心肺复苏术c、a、b、d步骤抢救，才能使病人生命在最短的时间内获救。因此。医疗卫生医务工作者及广大群众必须要学会心肺复苏技术，学会这门技术，必须要建立师资培训与有相应的配套器材，康谊企业为您提供仿真人心肺复苏技术训练模型。

大屏幕液晶彩显高级全自动电脑心肺复苏模拟人的描述：

kay/cpr680

大屏幕液晶彩显高级全自动电脑心肺复苏模拟人

执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准

功能介绍： 大屏幕液晶彩显:

人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、矩形图表数据统计.

人工手位胸外按压时： 1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域) 由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度。 2、液晶计数显示；详细记录按压错误的各种原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置不对及正确的次数）。

3、矩形图表数据统计：按压正确、按压力量过大、按压力量不足、按压正确等详细图表统计显示。

4、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的各种原因，以便训练者及时改正。

模拟标准气道开放； 人工口对口呼吸(吹气)时： 1、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml）由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的各种原因（按吹气量过大、吹气力量过小、及吹气正确的次数）

3、矩形图表数据统计：吹气力量过大、吹气力量不足、吹气正确等详细矩形图表统计显示

4、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的各种原因，以便训练者及时改正。

按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

操作周期：30次有效胸外按压及2次人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：至少100次/分。

操作方式：训练操作；考核操作(专业考核、普及考核)。 操作时间：以秒为单位计时。

语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。

成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单或短条成绩单。 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。

材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具； 高级电脑大屏幕液晶显示器一台；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 复苏操作垫一条； 屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 热敏打印纸二卷；

2010国际最新操作指南光盘一盘； 现场急救常用技术使用手册一本；  
保修卡、合格证； 使用说明书一本。