

GD/CPR300S-A高级自动电脑心肺复苏模拟人

产品名称	GD/CPR300S-A高级自动电脑心肺复苏模拟人
公司名称	上海佳悦科教设备发展有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	材质:进口热塑弹性体混合胶材料 品牌:佳悦 商品名称:高级自动电脑心肺复苏模拟人:商品 编号:j0220
公司地址	中国 上海市黄浦区 云南南路261号
联系电话	86 021 63287865 13901720687

产品详情

材质 进口热塑弹性体混合胶材 品牌 佳悦
料

商品名称:高级自动电脑心肺复苏模拟人		
商品编号:j0220		商品型号:gd/cpr300s-a
单位:台	价格(元)9500元	产地:上海

详细信息:

该产品在第七代gd/cpr300s的基础上进行升级,其核心模块包括模拟人、心肺复苏显示屏。可进心肺复苏的训练和考核,打印与显示一体化。实现瞳孔变化、颈动脉搏动、气道开放等心肺复苏施救成功的必要条件。适应于社会心肺复苏培训机构、医院、医学院、卫校等医疗单位进行心肺复苏培训。

执行标准:美国心脏学会(aha)2005国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准

功能特点: 模拟标准气道开放显示,语言提示; 人工手位胸外按压指示灯显示,数码记数显示,语言提示:· 按压位置正确,错误的指示灯显示,数码记数显示,错误的语言提示;· 按压强度正确(4-5cm区域),错误(<4-5cm<区域)的显示分别由条形(黄绿红)数码指示灯移动的动态反馈显示cpr

按压深度正确，错误的数码记数显示及错误的语言提示；人工口对口呼吸（吹气）的指示灯显示、数码计数显示、语言提示：·吹入的潮气量 500ml/600m-1000ml 的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的数码计数显示及错误的语言提示；·吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言显示； 按压与人工呼吸比：30：2（单人或者双人）； 操作周期：2次有效人工吹气再按压与人工吹气30：2五个循环周期cpr操作；操作频率：最新国际标准：100次/分钟； 操作方式：训练操作，考核操作； 操作时间：以秒为单位时间计时，可设定考核操作时间； 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定； 成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单； 生命体征变化：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动，按压过程中，颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致，抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 电源状态：采用220v外接电源，经过稳压器输出电源24v。

材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

gd/j110-4四肢创伤模块