

GD/CPR400S高级自动电脑心肺复苏模拟人（大屏幕液晶彩显）

产品名称	GD/CPR400S高级自动电脑心肺复苏模拟人（大屏幕液晶彩显）
公司名称	上海佳悦科教设备发展有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	材质:进口热塑弹性体混合胶材料 品牌:佳悦
公司地址	中国 上海市黄浦区 云南南路261号
联系电话	86 021 63287865 13901720687

产品详情

材质 进口热塑弹性体混合胶材 品牌 佳悦
料

商品名称：高级自动电脑心肺复苏模拟人（大屏幕液晶彩显）		
商品编号：j0216		商品型号：gd/cpr400s
单位： 台	价格(元)14500元	产地：上海
详细信息：		
该产品采用美国心脏学会(aha)2005国际心肺复苏（cpr）& 心血管急救（ecc）指南标准，并在原来第七代gd/cpr400s型的基础上进行升级，率先开发出专门针对社会心肺复苏普及与医学院校、医疗卫生系统培训使用的超新一代产品，其造型更完美、功能更强大、操作更方便的领先产品。		
执行标准：美国心脏学会(aha)2010国际心肺复苏(cpr) & 心血管急救(ecc)指南标准		

功能特点： 大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示。
模拟标准气道开放显示、语言提示。 人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：· 按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。· 按压强度正确(4-5cm区域)、错误(< 4-5cm < 区域)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示cpr按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：· 吹入的潮气量 500ml/600ml-1000ml 的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。· 吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；液晶计数显示；错误语言提示。 按压与人工呼吸比：30：2(单人或双人)
操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期cpr操作。
操作频率：最新国际标准：100次/分。 操作方式：训练操作；考核操作。 操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单。 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应；以及考核程序操作完成后颈动脉自动搏动反应的真实体现。 电源状态：采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源24v。

材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

标准套配置： 高级复苏全身人体模型一具； 高级电脑大屏幕液晶显示器一台； 豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 豪华便携式显示器铝塑箱一只； 复苏操作垫一条； 一次性消毒屏障面膜(50张/盒)一盒； 人工呼吸屏障面罩(挂件式)一只； 可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 热敏打印纸二卷； 最新教材书一本； 使用手册一本。

选配： gd/j110-4四肢创伤模块