

多功能熔浆机 安全仪器 全禾

产品名称	多功能熔浆机 安全仪器 全禾
公司名称	金坛市华城全禾实验仪器厂
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:安全仪器 品牌:全禾
公司地址	江苏 金坛市 北环东路25号
联系电话	051982710307 13376273521

产品详情

多功能血液溶浆机多功能血液溶浆机是我厂经多家医院血库需求，特自行研制了新型多功能溶浆机，该机采用数码显示，电脑控温，可根据不同的需求，任意设定温度，水温差不大于 ± 1 ，配套安装了自动摇摆系统，可自动调控频率，特别是融化血浆，融化和摆动同时进行，数分钟取出即可使用。减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者。是血库理想的配套工具。一．多功能血液溶浆机主要技术参数及特点：1：温控 37 ± 0.5 （可调）2：温控精度 ± 0.5 3：数码显示温度，微电脑控温。4：加热功率 1000w5：解冻时间，10min6：最大化浆量:4-10袋7: 有不可移动不锈钢解冻蓝10只8：设有自动双臂往返摇摆系统自动调频。

特点我厂经多家医院血库需求，特自行研制了新型多功能溶浆机，该机采用数码显示，电脑控温，可根据不同的需求，任意设定温度，水温差不大于 ± 1 ，配套安装了自动摇摆系统，可自动调控频率，特别是融化血浆，，融化和摆动同时进行，数分钟取出即可使用。减少了工序，为抢救病人节省了时间，方便了医务工作者。是血库理想的配套工具。

二．多功能血液溶浆机注意事项1：平时设定水温，可长期开机，用时将摆幅开关打开，设定频率，自动摇摆，用完关掉摇摆开关，节约用电，减少机械磨损。2．使用前一定要将水加到水位线，切勿干烧，以保护加热管。随着开机时间的不断增长，水箱的水回逐渐蒸发，请随时检查水位(加水换水)。确保机器正常运转。3.设定温度：按set键可设定或查看温度设定点。按一下set键管字符开始闪动，表示仪表进入设定状态，按 键设定值增加，按 或 键数据会快速变动，再一次按set键仪表回到正常工作状态温度设定完毕，开始加热指示灯亮。

多功能血液溶浆机 系列：

rj-4多功能血液溶浆机、rj-6多功能血液溶浆机、rj-8多功能血液溶浆机、rj-10多功能血液溶浆机、rj-12多功能血液溶浆机、rj-14多功能血液溶浆机、rj-16多功能血液溶浆机

.....
.....

.....
.....
本产品的加工定制是是，类型是安全仪器，品牌是全禾，型号是RJ-10，测量范围是100（可调），测量精度是 ± 1 ，电源电压是其他（V），尺寸是其他（mm），用途是医院