

100%原装至力音悦A13助听器锌空气电池

产品名称	100%原装至力音悦A13助听器锌空气电池
公司名称	乐清声桥听力技术设备有限公司
价格	1.25/个
规格参数	品牌:珠海至力音悦 型号:A13/PR48 化学类型:锌-空气纽扣电池
公司地址	乐清市乐成街道丹霞路69号、71号
联系电话	86 0577 62900201 15067702916

产品详情

注意1.25元为一粒的价格，一板10粒，需要几板购买数输入10的倍数！购买之前请务必联系下客服，告知下需要的电池型号及数量以方便发货！或者购买后留言备注需要的电池型号及数量！默认下单按下图中的a13也就是pr48型号电池发货

实物拍摄图：

独立转盘装 1.25/粒 每板10粒 最少一板销售

近期全新正品 二年保质 整盒125元

至力音悦助听器锌空电池a13

型号：a13(适合大部分耳背式助听器以及耳内式助听器使用)

保质期：2年

生产日期：近期新品

规格：直径：7.9mm 厚度：5.4mm 电压1.4v。

网店新开业，特价销售，保证原装正品，亲可以放心购买！本店实体店在浙江省乐清市丹霞路69号峰力店，有时可能从事实体店工作未及时回复旺旺信息，如无人应答，可电话联系15067702916；本人qq：570

至力音悦系列为国产优质助听器电池品牌至力推出的高性价比电池产品。对于很多助听器的用户，音悦系列的电池不仅让他们享受到可靠的质量保障，又能够为他们减轻经济上的负担。音悦电池是值得向广大助听器用户推荐的一个电池系列。对于大多数助听器用户，至力音悦的电池已经成为他们日常生活中必不可少的部分。

常见问题:

1，一粒电池能用几天或多长时间？

电池实际使用时间与助听器型号，放大功率，个人听力损失程度，每天使用时间及使用调节的音量等因素有关，差别非常大。一般的，助听器所用电池越大，听力损失越小，使用的时间就越长。从我们了解的实际使用情况看，以下时间可供您参考：

型号	尺寸-毫米	使用时间	适用机型
10	直径5.8厚度3.6	3-10天	深耳道式以及迷你耳背机
312	直径7.9厚度3.6	6-15天	耳道式(itc)，小功率耳背机
13	直径7.9厚度5.4	7-20天	大部分耳背机，耳甲腔式(ite)
675	直径11.6厚度5.4	15-30天	特大功率耳背机(bte)

2，国产电池和进口电池有什么区别？

电池质量好坏，主要在于电量和电压的稳定性，两者缺一不可。进口电池的电量和电压稳定性都要比国产电池好很多。电量决定使用时间，电压的稳定性决定了助听器是否能正常的处理声音信号。好多客户往往只注意用的时间，而忽略了电压的稳定性。大家都知道助听器分三六九等。其实，助听器的性能越好，对电压的稳定性要求就越高。只有稳定电压的支持，助听器处理数据才能发挥最好的效果。电压不稳定的表现：开始声音正常，用一半后出现声音变小，声音失真。

3，为什么有的新电池刚放入助听器就没有电，测电器检测不是满电？这是由于您刚刚撕下胶带或电池温度过低。电池底部进气孔出厂时已用胶纸粘上，此时电池内无氧气，处于休眠状态，电压偏低且不均匀，不能作为检测标准。撕去胶纸后5-30分钟电池被空气逐渐激活，开路电压会逐渐升到1.4v左右。另外，在北方寒冷季节，刚刚从室外拿回来的电池由于温度低，需要待温度回升到室温后才能使用。

4，为什么有时新电池装上好久也没电或用很短时间就没电了？首先，您说的“没电”是否用测电器检测的，还是仅凭助听器无声或者声音小来判断的。用过助听器的都知道，助听器因为长时间戴在耳内，容易被耳耵聍堵塞出声口。出声口堵塞，就会无声或声音很小。不了解的用户会误认为电池没电或电池用的时间短。所以遇到这种情况，首先检查是否出声口堵塞，并做清洁处理；还有一种情况就是助听器的电池极片松动或被氧化不通电，也会出现无声的情况，建议到验配中心由专业人士处理。我们是实体验配中心，这种情况经常会遇到。

5.电池底部的胶带是做什么的?电池取出时再贴上是否可以再用?胶带用于封闭正极的透气孔，隔绝空气，避免电池不用时空气中的二氧化碳水蒸汽等各种成分对电池造成的影响。这时电池处于休眠状态，可以长时间保存。如将用了一段时间的电池从助听器中取出，再用胶带将气孔封上，虽然可以少量延长电池寿命，但由于电池已经部分放电，内部已经发生氧化反应，一般没有必要这样做。

本产品的品牌是珠海至力音悦，型号是A13/PR48，化学类型是锌-空气纽扣电池，标准电压是1.4V，额定容量是mmah，外型尺寸是7.9*5.4（mm）