

## 护理用品 佳寰 PE

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 护理用品 佳寰 PE               |
| 公司名称 | 上海佳寰实业有限公司               |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 | 品牌:佳寰<br>材质:PE           |
| 公司地址 | 上海松江新五库经济城（小区内）          |
| 联系电话 | 021-63034266 13701741832 |

## 产品详情

品牌 佳寰 材质 PE

jh-yz81 可以根据客户要求定做

尺寸:19.5\*7.5(cm)

重量:81g

使用方法：

冷敷法将眼罩（面罩）放入冰箱冷藏室预冷，1小时后取出使用，急用时可放入冰箱冷冻室预冷，使用时佩戴于眼部即可。

热敷法 可以用微波炉或者热水来准备热敷的眼罩或者面罩

- 1，使眼罩或者面罩沉浸在沸腾后的热水中大约4-6分钟
- 2，把眼罩或者面罩放入装有热水的容器中，然后放入微波炉中用中火加热约1分钟。

功效：

- 1、改善眼部微血管循环、消除改善用眼疲劳、恢复睫状肌弹性。
- 2、改善用脑过度引起的头晕眼花、健忘、厌食等不适感，减轻偏头痛、神经衰弱、失眠等脑疲劳综合症。
- 3、消除眼袋、黑眼圈、增强眼部周围皮肤的光洁度和弹性。

注意事项：

1.眼罩（面罩）仅供外用，如内容物接触眼睛或皮肤，应用清水彻底清洗。

2.如不慎误食内容物，应饮下大量清水及尽量吐出，必要时联系医生。

3.为防止温度过低，刚开始使用时最好用毛巾或棉布包裹，如使用者循环系统有病，应先请教医生。

**特性：**

本品冷热两用，使用简易，冷敷时袋体在-18℃以下仍保持柔软，并可在冷热交替重复循环使用