

# 酒精测试仪 酒精检测仪 中性

产品名称	酒精测试仪 酒精检测仪 中性
公司名称	深圳市福田区卓信电子厂
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中性 型号:双屏
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 18栋302
联系电话	86 0755 61689129 13510927640

## 产品详情

无论是自备 送长辈~送领导~送朋友都有面子！

酒后驾车，罚款事小，安全事大！您的酒量可能超一流，驾车前请用本品测试，做到安全驾车！！

新法对饮酒后驾车的处罚规定是五日以下拘留；暂扣3到6个月驾照；500元至2000元罚款；一年内两次醉酒驾车的，将吊销驾照。

本产品属于内部专供交\*\*产品，货真价实~

酒醉驾驶标准上海酒后0.3mg/ml ( = 0.03% ) 酒醉1.0mg/ml ( = 0.1% ) 浙江酒后0.2mg/ml ( = 0.02% )

酒醉1.0mg/ml ( = 0.1% ) 四川酒后30mg/100ml ( = 0.03% ) 酒醉100mg/100ml ( = 0.1% ) 重庆酒后10mg/100ml ( = 0.01% )

酒醉100mg/100ml ( = 0.1% )

使用说明：按屏幕正面长按1-3秒“ power ” 开机键进入约10秒的传感器预热倒计时过程。

当看到屏幕出现biow字样开始呼气 (向吹气孔连续呼气约3-6秒钟左右进入约5秒的反应期同时测试结果会显示在lcd上，约5秒钟后自动关机。

将口部贴近呼气测试感应器，并连续3-6秒呼气到感应器内。

显示屏可读取测试结果。

当测试结果达到下列范围时，“caution”“警告”字句便会显示 0.02% bac(or 0.2g/l)to 0.05% bac(or 0.5g/l) 0.05% bac(or 0.5g/l)to 0.08% bac(or 0.8g/l)

当测试结果达到下列的范围，“danger”“危险”字句便会显示。 over & equal 0.05% bac (or 0.5g/l) over & equal 0.08% bac (or 0.8g/l)

《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性国家标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml时驾驶机动车为酒后驾车；大于或等于0.8mg/ml时驾驶机动车为醉酒驾车。

报警声音说明:当测试结果比预设的报警点低,其差值大于0.2%bac时,数字显示测试结果,无报警声.当测试结果其差值小于或等于0.2%bac时,数字显示测试结果,有预报警声.(只有当报警点大于0.40%bac心上时才有此项功能.)

维护与保养请勿使用笨、稀释剂或汽油等溶剂清洁本产品，以免损坏机体外壳。防止跌落和强震，否则会导致本机故障。除更换电池外，请勿尝试修理、改造或拆卸零件。如果长时间不使用本产品时，请取出电池，以免因电池漏液而损坏本机。

详细介绍：

? 时钟功能? 温度显示功能(摄氏度和华氏度)? 双液晶显示器? 酒精含量数字显示(最小单位0.01% bac 或 0.1g/l)? 测度范围：0.00~0.19 % bac & 0.0~1.9 g/l? 快速响应和恢复? 自动关机省电功能? 酒精测试器使用 2 × “aaa” 碱性电池 (本机不附带)? 产品尺寸：100 × 37 × 17 mm

更换电池：当lcd显示屏上显示lo表示电力不足，本机将会自动关机，需要重新更换新电池以确保测量的准确性。

请在饮酒3分钟后使用;在吸烟10分钟后使用.禁止直接向探测器吹液体或烟雾。连续测试须间隔3分钟左右，这样数据才准确。请勿在强风或空气不流通的地方测试.请勿在有挥发性气体的地点使用.

酒精检测仪必须使用高容量的碱性电池

本店所有酒精检测器均不含电池出售

新疆和西藏的朋友发普通快递运费是24元的哦，拍下联系客服改价格哦！

本产品的加工定制是是，品牌是中性，型号是双屏，类型是便携式酒精检测仪，测量范围是0.00~0.19%BAC&0.0~1.9g/l