

# 男士半框近视眼镜架合金弹力硅胶舒适百倍商务8808

产品名称	男士半框近视眼镜架合金弹力硅胶舒适百倍商务8808
公司名称	丹阳市开发区清悦眼镜商行
价格	18.00/副
规格参数	品牌:佳士达 材质:金属架 类型:近视镜
公司地址	丹阳市中国丹阳眼镜城82030室
联系电话	86-051186516313 13615298950

## 产品详情

品牌	佳士达	材质	金属架
类型	近视镜	款式	半框架
型号	8808	框色	黑, 枪, 蓝

清悦眼镜实体点

新品上架

秋品最新上市，百搭框架系列~

半框男士商务时尚硅胶架，最新医用材料90度弹力设计，佩戴更加舒适。

硅胶时尚，半框休闲时尚，

镜腿内侧内置弹簧，弹力十足，不压耳后跟。

硅胶材质180°天生弹力舒适百倍

防滑磨砂质感，抗过敏，防腐蚀，超轻感受。

震撼的质量保证~

丹阳清悦眼镜批发部

2010年热卖款上市

齐款齐色

支持混批~

价格面议~

需要请记住您需要的型号和颜色和数量

例如：

3853: 红色1副，黑色3副，紫色2副，蓝色1副

3612: 黑色1副.....

详细请联系我 13615298950

佩戴更加轻盈~抗过敏抗腐蚀适合长期佩戴哦~

镜片在这里哦~

(无散光)如下：

s

右眼(r)：- 近视度数左眼(l)：- 近视度数瞳距(pd)：mm

(有散光)如下：

s c a

右眼(r)：-近视度数 - 散光度数 \* 散光轴向左眼(l)：-近视度数 - 散光度数 \* 散光轴向瞳距(pd)：mm

均码

镜片宽：54mm

鼻梁宽：18mm

镜腿长：140mm

镜片高：29mm

总长度：141mm

#### 眼镜的保养方法：1、眼镜的摘戴

请用双手拿住镜腿沿脸颊两侧平行方向摘戴。若用单手摘戴会破坏镜架左右平衡，及引起变形。

#### 2、折叠镜框应从左边开始

大多数的镜框都是按从左镜腿开始折叠设计的，所以如果先折右镜腿，很容易造成镜框的变形。

3、旋转方法 如果是暂时性放置眼镜，请将眼镜的凸面朝上。若将凸面朝下摆放眼镜，会磨花镜片。

4、擦镜片的方式 使用清洁的专用试镜布，注意务必用手托住擦拭镜一侧的镜框边丝，轻轻拭擦该镜片。避免用力过度造成镜框或镜片的损伤。5、镜片沾灰或脏东西时 干擦容易磨花镜片，建议清水冲洗再用纸巾吸干水份后用专用眼镜布擦干。镜片很脏时，建议用低浓度的中性洗涤剂清洗，然后用清水冲洗擦干。6、请使用眼镜盒 不戴眼镜时，请用眼镜布包好放入眼镜盒。保存时请避免与防虫剂、洁厕用品、化妆品、发胶、药品等腐蚀性物品接触，否则会引起镜片、镜架劣化、变质、变色。

7、眼镜变形时镜架变形会给鼻子或耳朵造成负担，镜片也容易松脱。建议定期到专业店进行整形调整。

地址：江苏丹阳中国眼镜城二楼82030-82031号

清悦眼镜

电话：0511-86516313、13615298950

qq：55110807

#### 【包裹签收】

1、签收包裹时（收货本人），请当快递员的面打开检查,发现外包装严重破损、货品缺少的情况，请拒绝签收并立即与我们联系（0511-82319871）。由我们找快递公司给予解决，否则概不负责，请见谅。

2、请您在确认宝贝没有问题,麻烦您给确认一下货款,因为我们也需要资金周转,感谢了!!!

#### 【退换说明】

1、特价、团购、拍卖商品不退不换(请看清楚再决定出价)。

2、加工好后（眼镜+镜片已装配的）商品不退不换！除非出现质量问题可换！

3、只购买眼镜架商品的，退换的商品需保证商品未污损、未使用、是商品原包装。（否则不给与退款）

