

眼博士弱视遮盖眼贴儿童全遮盖护眼贴单眼矫正

产品名称	眼博士弱视遮盖眼贴儿童全遮盖护眼贴单眼矫正
公司名称	明远视力眼用品店
价格	20.00/盒
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市坊子新区
联系电话	0536-2105952 15615267662

产品详情

老款：20片一个包装袋包装，每片无黑色遮光层。

每贴用1 - 6天，可贴在眼皮肤上或眼镜片上

尺寸大小:

老款：长7.5厘米 宽3.5——4.8厘米

每贴可用1 - 6天，可贴在眼皮肤上或眼镜片上

弱视眼贴四大特点:

1由著名弱视专家刘东光教授设计

2于眼眶形状一致,盖眼彻底 自然

3与肤色一致,小孩易接受

4医用沙纺，透气性更好

眼贴遮盖原则：A.双眼视力一致，双眼交替遮盖，右眼三天，左眼三天，星期天双眼去除遮盖一天。
 B.双眼视力相差两行，右眼四天，左眼两天，星期天双眼去除遮盖一天。
 C.双眼视力相差四行，右眼五天，左眼一天，星期天双眼去除遮盖一天。
 D.单眼视力低下，另一只眼视力正常，健眼遮盖，星期天双眼去除遮盖一天。遮盖方法：
 一、遮盖法：是治疗儿童弱视最简单、最经济、最有效的方法之一。
 单眼严格遮盖法：适用于屈光参差性弱视和斜视性弱视患儿。

双眼交替遮盖法：适用于屈光不正性弱视和单眼斜视性弱视。
 半遮盖法：适弱视眼视力已恢复正常但仍低于健眼者，为巩固疗效，可在做作业或看书时遮盖健眼，平时不遮盖。

优劣对比		
眼贴	眼罩	
全遮盖、够彻底	半遮盖	
不透光	容易透光	
避免好眼偷看、斜眼	产生好眼偷看、斜眼	
治疗效果最好	治疗效果一般	