

医用折射仪 医用尿比重计

产品名称	医用折射仪 医用尿比重计
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

医用折射仪 医用尿比重计 生理液浓度计 尿比重计 血清蛋白

医用折射仪：

医用折射仪能准确迅速测量人及动物生理液的浓度水平，三组刻度分别测尿比重，血清蛋白及折射率。该产品结构简单、操作携带方便、视野清晰，是医院、科研机构以及兽医行业不可缺少的检测设备。

主要技术参数：

产品名称	序号	型号	测量范围	最小刻度值	外形尺寸(mm)	重量(g)
血清蛋白/ 尿比重计	1	BR301ATC	0 ~ 12g/dl(血清蛋白)	0.2g/dl	28/30*40*171	185/215
			1.000 ~ 1.050sg(尿比重)	0.002sg		
	2	BR302ATC	0 ~ 12g/dl(血清蛋白)	0.2g/dl	28/30*40*170	185/215
			1.000 ~ 1.050sg(尿比重)	0.002sg		

折光仪说明：

折光仪根据不同浓度的液体具有不同的折光率,这一原理设计而成,是利用光线测试液体尝
试的仪器.

特点及用途

折光仪系精密光学仪器,具有使用快速简便测定准确、重量轻、体积小等优点,该仪器能准确测定溶液中所
含糖份的百分浓度,用于食品、农业科研等行业.

仪器的组成部分

- 1、 折光棱镜
- 2、 进光板
- 3、 零位校正螺丝
- 4、 橡胶套
- 5、 接目镜

使用方法

- 1、 使用手持折光仪时，用左手指握住橡胶套，右手调节目镜，防止体温传入仪器，影响测量精度。
- 2、 打开时光板，用柔软绒布将折光棱镜擦拭干净。
- 3、 将蒸馏水数滴，滴在折光棱镜上，轻轻合上进光板，使溶液均匀分布于棱镜表面，并将仪器进光板
对准光源或明亮处，眼睛通过接目镜观察视场，如果视场明暗分界不清楚，则旋转接目视场清晰，再旋
转校零螺钉，使明暗分界线置于零位。然后擦净蒸馏水，换上测试溶液，此时视场所视其分界线，所处
相应分划刻度值则为所测试溶液浓度值及密度值。

注意事项本仪器系精密光学仪器,在使用和保养中,应注意以下事项:

- 1、 在使用中，必须细心谨慎，严格按说明使用，不得任意松动仪器各连接部分，不得跌落、碰撞、严禁
发生剧烈震动。
- 2、 使用完毕后，严禁直接放入水中清洗，应用干净柔软绒布沾水擦拭干净，对于光学零件表面，不应碰
伤、划伤。

3、仪器应存放于干燥、无灰尘、无油污和无酸等腐蚀气体的地方，以免光学零件腐蚀或生霉。

4、本仪器自售出之日起保修期一年，期内如属正常使用发生故障，用户又未自行检修，我公司负责免费维修，超过保修期或由于使用不当造成故障，本公司负责维修，适当收取修理费用。

附件:1、说明书一份 2、螺丝刀一把 3、吸管 一支

本公司主营：酒精度计 蜂蜜浓度计，电池液比重浓度计，各种冰点仪 盐度计 手持式折光仪
糖度计 乳化液浓度计 切削液浓度计 豆浆浓度计 医用尿比重计 汽车尿素测试仪 甲醇度
计 牛奶浓度计

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com