

供应家用全自动上臂式血压计

产品名称	供应家用全自动上臂式血压计
公司名称	河北昊众商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优乐康 型号:HK-805
公司地址	石家庄市桥西区中华南大街366号(天鹅湖大酒店南侧)
联系电话	0311-69004665 13933833732

产品详情

供应家用全自动上臂式血压计

供应家用全自动上臂式血压计

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

手腕式电子血压计

电子血压计的一种。手掌大小，外形与手腕间隙更小的碗带，抗菌材料制作，数字显示血压及脉搏数。

手腕式血压计由于所测的压力值为腕动脉“脉搏压力值”，对于大多数中、老年人，特别是血液粘稠度高者、微循环不佳者、血管硬化症患者等较特殊的人群，用手腕式血压计与用上臂式血压计多次测量的平均值之间，会有较大的差别——相差 $\pm 1.3\text{kPa}$ （ 10mmHg ）以上是很常见的。所以，对于已购有手腕式血压计的个人来说，建议：用作个人监测——可随时掌握自己的“血压”变化情况，但要明确指出，它所测的不是习惯上所说的“血压值”，而是“腕部脉搏压力值”。

产品特性

全程语音操作检测，真人发音

两大特别功能：心律不齐提示功能、WHO健康提示

2X60组记忆值，读取容易

超大液晶显示屏

[金属烤漆](#)，外观精美，错误提示，性价比高

保修：二年保修

额定电压：DC3V,2节7号干电池

尺寸：72MM宽*70MM高*32MM厚

规格说明 测量方式：手腕式压力感应式测量

测量范围：压力：40~280毫米汞柱（5.3~37.3千帕）

脉搏：40~200跳/分钟

精确度：静态压力： ± 3 毫米汞柱（ ± 0.4 千帕）

脉搏：显示值的 $\pm 5\%$

记忆容量：2个用户各60组记忆7、电源：2节7号1.5V碱性电池

操作环境 +10 ~ +40 ，相对湿度低于 85%

储存和运输环境：-20 ~ +40 ，相对湿度低于 85%

产品特点 这款血压计采用方便的腕式测量，只需按一个键，不到一分钟就可完成测量，简单、迅速，让您即使百忙之中，也能很容易地随时监护自己的健康。不必费事脱衣服卷袖子，即使在办公室或在出差途中，也能很方便地量血压；

只需一按不到一分钟即出结果；

全自动设计，测量高压/低压/心率，只需按一个按钮即可，任何人都能迅速掌握；

六段分类指示显示 无须专业知识便知血压是否正常；

世界卫生组织将**血压**分为重高、中高、轻高、**高正**、正常、最佳六段标准，血压计根据此标准可自动显示您的血压处于哪一类，您无须医学知识即可知道自己的血压处于何种状态；

记忆功能 方便进行血压对比

专业医师认为，血压的变化情况往往比单次的血压值更值得关注，本血压计可自动记忆2组60次测量结果，方便2个人您对不同时间的血压值进行跟踪对比。

使用注意事项 测量前安静休息片刻，以消除紧张、劳累对血压的影响；

被检查者手臂应与心脏位置同高；

袖带放置平展，松紧度以插入两个手指为宜；

一般连测2~3次即可，取其最低值做为本次血压的数据。

手臂式电子血压计

测量方法与传统水银血压计相近，测的是肱动脉，因其臂带放至上臂，其测量稳定性优于腕式血压计，更适合年纪较大、**心率不齐**

、糖尿病引起末梢血管老化等患者使用，缺点是没有手腕式电子血压计方便。

手臂式电子血压计的正确使用方法

静坐数分钟，将手臂穿入臂带并绑定

裸露手臂或仅穿薄衣进行测量；

臂带捆绑力度适中，以能放进一根手指为宜；

臂带中心处于心脏在同一高度；

臂带下方距肘关节1-2cm；

按用户键，即自动开始测量

测量时手掌放松，手掌向上；

测量过程中保持平静，身体放松；

勿在测量过程中说话，移动身体；

结果显示，手动关机或自动关机

测量完成后，显示血压值、脉搏值；

如特殊情况，将出现心率不齐提示；

数据自动上传至Boumi倍益知心健康管理平台；

测量完成后按任意键关机；

如忘记关机，血压计会在60s种自动关机；

语音电子血压计

概述：[语音电子血压计](#)

是在原有电子血压计的基础上加上了语音播报功能，解决了老年人看不清等难题，更为人性化。

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

供应家用全自动上臂式血压计

供应家用全自动上臂式血压计