

美容版超声刀 紧肤除皱抗衰美容仪器

产品名称	美容版超声刀 紧肤除皱抗衰美容仪器
公司名称	广州市皇廷电子有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:皇廷
公司地址	广州市白云区太和镇龙归北村皇子工业区7栋
联系电话	020-36005062 18926299956

产品详情

产品介绍

产品信息 商品名称：美容版超声刀 包装尺寸：51.6*37.6*45.6cm(主机)
包装尺寸：60*53*126cm(推车) 商品毛重：40kg 仪器功效：1.收紧前额的皮肤组织,提升眼眉线条;2.消除眼睛、额头周围的皱纹;3.提升松懈的面颊脂肪;4.收缩毛孔和粉刺疤痕;5.去除双下巴,改善下巴线条;6.去除颈部皱纹,防止颈部皮肤老化;7.改善鼻唇褶皱,去除八字纹;8.收紧和提升面颊皮肤,回复皮肤弹性. 仪器特点：1.领先:美国引进hifu超声聚焦精确定位；2.安全:非侵入式治疗不损伤表皮；3.快捷:施术时间短，脸部和颈部仅需20~30分钟；4.舒适:不需要麻醉或表麻，无疼痛，无副作用；5.精确:多治疗探头，作用不同部位

导购推荐

双屏水氧注氧仪	豪华射频注氧仪	水氧光动力美肤仪	乳房音乐瑜伽仪
冰动力减肥仪	家用热玛吉	盆骨治疗仪	美胸魔法师

hifu(高强度聚焦超声波)美容原理

利用hifu的声波聚焦原理，通过仪器精准控制能量聚焦在皮下组织3mm处的胶原蛋白层和4.5mm的筋膜层上，当温度上升至65℃，聚焦处的smas产生蛋白凝固反应，从而以凝固点为中心向四周产生拉力，同时刺激胶原蛋白重组补充，新生成的胶原蛋白可以渐渐从内紧致和提升皮肤，回复弹性，达到消除皱纹效果。

超声刀不是刀，而是一部最先进的仪器，是各大整形美容机构必备设备，我们用“刀”来表示效果的神奇和快速！超声刀一个明星都在做的项目、各大卫视都在播报，不开刀、不流血，不红不肿不痛，即做即走，不知不觉把下垂、皱纹、松弛、肥胖的脸变紧实、打造v型脸，让女人真真正正年轻10岁不是梦。快来够买吧！！！！

伴随着环境污染，精神压力、不规律的生活习惯，还有如影随形的紫外线和干燥空气，不知不觉中，肌肤开始老化，松弛，软妹子生生的变成了爬满皱纹的小妇人。

据某时尚美容调查，96.6%的软妹子都在担心老化问题

肌肤为什么会老化？

她们曾经这样与衰老对抗

一、饮食抗衰老：见效慢，需要严格遵照食谱按时就餐，无法根据喜好随意饮食。

二、运动抗衰老：见效慢，需要有坚强的毅力持之以恒，否则可能引起反弹。

三、化妆品粉饰：只能作暂时遮掩，无法真正去除皱纹，过度使用还会引发各类肌肤问题，加速肌肤衰老。

能解决以上三点的只有它！高强度聚焦超声刀，一次治疗年轻5--10岁，紧致抗衰老技术

超声刀的神奇作用，让时光为美丽逆转。

超声刀紧肤抗衰老系统是一项通过一次治疗立即可达到紧肤效果的抗衰老技术，被誉为世界紧肤抗衰老技术金标准。经过医学科技的不断探索与创新，超声刀的紧肤专利技术已升级，破解了多年以来不能应用于整个面部的难题，并攻克了立体化提拉紧肤的医学壁垒。在临床上，已为8000多名爱美女性重塑立体、紧致的青春容颜，这其中包括很多知名人士和国际明星。

hifu超声刀施术效果

时间	做完后	一个月后	三个月后
效果	局部细微提拉	整体细微提拉	整体明显的提拉
	肤质美白及改善	肤质改善及紧实感	脸部紧致感明显
	感觉略微紧实	皮肤变得平滑	眼部皮肤有向上提感

适应症:适用于面部皮肤组织松弛下垂、皱纹过多、肤质老化粗糙，能有效重塑脸部曲线、提升眼周区及改善颈部组织松弛下垂显现。重塑腰、腹、臀等各部位轮廓。

首先这是目前全球唯一一台“拉提”获得美国fda认证的无创医疗美容仪器，也是目前作用深度最深的仪器，可以达到筋膜，以往要开拉皮手术才能治疗的筋膜层。

治疗的时候会看到像是这种超音波显示关于皮肤下的作用位置，所以能量发射是非常准确的;接著会以超音波能量传递到真皮层以及皮肤基底层，以及肌肉上的筋膜层，热能会启动身体自然恢复机制，会让作用的地方重新产生更多的胶原蛋白，并且有立即性收缩效果。所以刚打完这个ulthera超音波拉提，会有立即的拉提效果，等时间逐步过去，会渐渐看到更多的改变喔因为之后胶原蛋白会重新组合排列。

ulthera超音波拉提会依照治疗深度来更换探头

ulthera超声波拉提效果

- 1.掠过皮肤 不伤表皮 几乎没恢复期
- 2.作用层度深 达到肌肉上的筋膜层 拉提效果好
- 3.两层作用 立即紧缩拉提 + 6个月内的胶原蛋白增生重新排列组合

超声刀smas已在2013年通过了美国fda的认证，可针对眼皮下垂，产生拉提的效果。在58位受试者的治疗中，经过全脸及脖子超声刀smas的治疗90天后，以照片评估，平均眼皮的拉提幅度为1.7mm。

超声刀各类问题治疗前后对比：

细纹——快速恢复肌肤组织年轻态，增强紧致收缩能力，除皱、提升

深纹——抚平细化，高效刺激皮肤自身的胶原增生，重构胶原支架恢复皮肤弹性并深度紧肤

松弛——网状结构收缩、肌肉组织提拉紧致，轮廓收紧，提升

真人案例对比

作为凡人，没人能阻止岁月对肉体的腐蚀，就像现在走红的“小鲜肉”，也难保有朝一日就变成了满脸是褶的“腊肉”。

即便如此，有一部分明星却好似拥有一种“逆天”的“防腐功能”，就算时光在他们身上照样流逝，对容貌的“腐蚀性”却大大的削弱了，有人的脸蛋甚至被时间打磨得更加光滑紧嫩。

跨过40岁这条分水岭，当曾经的正太大多毕竟变成了猥琐大叔，他们却只不过从“鲜肉”变成“老鲜肉”

”。看看他们一路走来的证据吧，能“防腐”真的不是随口说说而已！

吴奇隆：如果吴奇隆不是在45的年纪仍保持着一张30岁的面孔，想把小自己17岁“若曦”娶到手大概就没有现在这么水到渠成了吧？不得不说，跟小虎队时期那个皮肤白皙、眼神稚嫩的19岁少年相比，我们还是能从吴奇隆身上看到变化，但是再对比32岁时的“萧十一郎”，就发现时间自从他三十岁后好像就放慢了步伐。看看今年1月份刚拍的这组封面大片，哪里能看出如今已经是“奔五”的人？

钟汉良：《何以笙箫默》热播以来，男主钟汉良又以他“高龄”的逆天颜值狠狠冲击着头条，41岁的年纪完美hold住剧中20多岁的“何以琛”一角，经得起任何高清镜头检验的好肤质瞧着让人真心佩服得紧！回顾一下出道以来的照片，从18岁的《少年五虎》，到29岁颜值巅峰时期的《逆水寒》，再到如今41岁的何以笙箫默，年纪虽说翻了一倍，但外形上的改变仅仅只是气质上的沉淀和成熟。

古巨基：在看《我是歌手》时，大概不少人总不自觉地把古巨基当做张靓颖一样的小辈来看待，以为他比韩红孙楠他们都要矮一个辈分。其实，我们只是受到了这张“娃娃脸”的欺骗，72年生的他，实际年纪仅仅比韩红小一岁而已。但是别说跟我们印象最深刻的“何书桓”时期对比了，就算是回溯到他19岁刚出道的时分，也不觉得古巨基的容貌对比当初有多大的改变，永远都是这张娃娃脸，永远是大家心中不变的“基仔。”

少年最宝贵的是什么？青春！！

明星最渴望的是什么？年轻！！

女人最害怕的是什么？变老！！

每个人的衰老程度和速度都不一样，

有许多技术可以控制衰老这个过程，

如果你顺其自然，那自然就会衰老，

极线音波拉皮又叫ulthera极线音波拉皮，是从美国引进的最新除皱抗衰嫩肤项目。

想要知道ultherapy超声刀?先弄清楚什么是smas筋膜层?

什么是smas？

smas也可以称为表情肌肉层，是皮肤松弛与皱纹产生的原因，位于皮肤下4.5mm深处。因此是切开皮肤的‘筋膜悬吊术’和玻尿酸注射时主要针对的组织层。

极线音波拉皮抗衰重点在温度和深度

深度：美国ulthera极线音波拉皮的治疗深度为3.0mm至4.5mm,除了作用到纤维中隔之外，还可以作用到更深层的smas层。smas层正是手术拉皮时会治疗到的重要拉提关键，因此ulthera极线音波拉皮大大突破了以往的限制，是国际首创能以非侵入式方式治疗

温度：最佳的温度保障：ulthera极线音波拉皮温度在65 -70 左右，是最适合胶原蛋白有效变性的温度。采用聚焦式超音波，完全不用对皮肤加热，不会对皮肤造成损伤!

ulthera先进之处是采用最先进的超音波能量，深层穿透，能够深至smas层，产生近万个凝结点，令胶原蛋白产生立即的收缩和刺激胶原大量新生和重组，构建全新的胶原蛋白纤维网，从而从皮肤底层给肌肤增强弹性。轻松的抚平皱纹，使松弛的肌肤立即的紧实起来，你会发现肌肤立即的紧致年轻很多，饱满富有光泽，触感柔嫩富有弹性。

极限音波拉皮的主要优势：

- 1.午餐式美容，方便又快捷：治疗时间短暂，一次只需半小时左右，百忙中的您只需利用午餐的时间就可即刻享受紧肤效果。
- 2.电波射频除皱方式更安全，不用开刀、不出血就可拉皮。
- 3.见效快又持久，极限音波拉皮的效果在一次做完之后就可产生，而且会渐渐释放至最佳效果。
- 4.适用范围广，无不良反应。

超声刀拉皮术注意事项：

1. 术后要避免出入高热环境，如蒸桑拿等;
2. 建议多做补水保湿的护理，尽量不要化妆;
3. 美肤后数小时内可能会有轻微的泛红、小刺痛等，这属正常、温和的暂时性反应，无需担心;
4. 对于美肤部位有开放性伤口或严重的青春痘的、孕妇等人群并不建议使用

超声刀使用操作步骤简介

操作步骤

2.插入探头。在手柄上插入探头，固定好，不做任何操作，大概10秒钟内，主机会自动识别插入的探头型号，大、中、小探头的识别显示分别如下：相应的位置会出现粉红色圆圈

大探头中探头小探头

3.调节好操作能量大小。为上调按钮，为下调按钮，能量一共有十个档位，分别是10 / 20 / 25 / 40 / 45 / 55 / 60 / 70 / 80 / 90，一般建议能量在70左右操作比较合适。如果过程中没热感才需再加强。

4.调节操作时间。为上调按钮，为下调按钮，建议操作时间在40分钟左右即可。上半圆为分钟，下半圆为秒钟。开始操作后就会进行时间倒计时。

5.探头使用次数的显示。“remain times”为对应探头的剩余使用次数，“used times”为对应探头的已使用次数。

6.开始操作。上面操作能量大小和操作时间后，按下“start”键，即可进入工作状态。

7.手柄操作。手柄上有一个指示灯和上下两个按钮。“上”按钮是间断性能量输出，在输出秒和停止一秒中循环反复。“下”按钮是持续性能量输出，输出时间根据自己按的时间随意调整，为了保证效果，一般用“下”按钮进行0至2分钟的操作（不宜超过2分钟）。

两个按钮在操作时均需按住不放，松开即中断一次能量输出操作，指示灯亮红灯代表能量处在输出状态。

8.操作过程。可以先用美容专用标记笔在客户脸上画上操作区域（可不画），然后在探头上或者脸上指定区域抹上凝胶。在操作过程中，选定一块固定区域，按下手柄按钮后，需要不断的上下来回紧贴脸部慢慢拖动，一定不要在脸上停止不动，否则能量会逐渐加强伤害到客户。操作时建议是用手柄“下”按钮来自由控制操作时间。

9.操作完毕。按下停止键“pause”，然后按下主机背后开关按钮关闭仪器。最后取下探头放好。

技术参数

项目	参数
电源	ac200-220v , 50/60hz
频率	3.2mhz
能量密度	0.2-1.8j/cm2
深度	3mm&4.5mm
重量	约32kg
机箱尺寸	450mm*315mm*395mm
推车尺寸	540mm*470mm*1200mm
治疗头尺寸	大 中 小
毛重	约40kg
主机包装尺寸	516mm*376mm*456mm
推车包装尺寸	600mm*530mm*1260mm
包装材料	珍珠棉加木箱
logo	可根据客户要求定制添加
部件	主机、推车、一个手柄、一套头、电源线、说明书