

# 超能激光鼻炎治疗仪，鼻之光鼻博士治疗仪厂家

产品名称	超能激光鼻炎治疗仪，鼻之光鼻博士治疗仪厂家
公司名称	深圳市康尔品礼品科技有限公司
价格	45.00/台
规格参数	品牌:健康使者 型号:xtk-082
公司地址	深圳市宝安区松岗深翔工业园
联系电话	13202288031

## 产品详情

产品名称：数码激光鼻炎仪 (美美 13202288031 企业qq：2880197007)

超级数码激光鼻炎治疗仪

规格：超激光鼻炎治疗仪-治疗鼻炎-用鼻炎仪，鼻之光鼻炎治疗仪-激光治疗仪批发-鼻炎仪价格-激光仪厂家

产品编号：xtk-082

详细说明：

### 【治疗原理】

- 一、修复受损鼻黏膜组织，恢复并提高鼻组织排毒代谢和自然免疫能力；
- 二、加快鼻黏膜内毛细血管丛血液循环速度，增加溶菌酶分泌数量和吞噬细胞的噬菌能力；
- 三、吸收鼻甲组织的渗出和水肿，改善鼻腔通气状态；
- 四、减少肥大细胞的组胺释放，缓解鼻过敏反应；
- 五、修复鼻黏膜和鼻纤毛组成的“黏膜毯”运动、代谢、排毒等免疫功能。

## 【疗效】

兴泰康鼻炎治疗仪治疗鼻炎疗效好见效快，超过八成的鼻塞症状在第一次使用后鼻腔会立即变得湿润而通畅，鼻痒、鼻塞状况有明显的改善；

使用5~10天，鼻黏膜开始被修复，苍白或溃疡现象消失，色泽变得红润；

使用2~4周，炎症基本被吸收，鼻黏膜水肿消失，鼻道变得湿润通畅，鼻自然免疫力基本恢复，鼻过敏现象明显缓解；

使用三个月，鼻腔代谢功能彻底修复，免疫力恢复到正常人水平，呼吸自然顺畅，鼻炎和鼻过敏现象完全消失。

兴泰康鼻炎治疗仪r probeam100%不含药物和化学物质，治疗过程无须配合药物和手术，从根本上提升鼻腔组织自然排毒和免疫能力；

治疗过程无痛苦、无损伤、绿色安全、见效快、愈后不易复发；

产品体积小巧、携带方便，一键式操作，可以随时随地进行治疗；

免除了药物和手术治疗反复治疗花费高、副作用大的缺陷，而且一人购买可全家共享；

最新推出的2011款兴泰康鼻炎治疗仪r probeam机型采用了进口金属激光器，治疗头的穿透力更强，疗效更好。

## 【操作指南】

- 1.为保证光疗头进入鼻腔后能更好的照射进入鼻黏膜，在使用前如果鼻腔内有较多分泌物，请先用医用消毒棉签蘸0.9%的生理盐水（大多药店有售）或温水清洁鼻腔，然后再进行治疗；
- 2.打开主机背后的电池仓，装入四节7号的电池，（由于兴泰康鼻炎治疗仪对电池电量要求较高，建议选择南孚牌聚能环电池）；
- 3.将光疗头插入鼻腔2-3厘米（不宜过深，否则下鼻甲部位接受不到激光照射），夹紧鼻中隔；
- 4.按动开关键，指示灯亮，光疗头会发出红色的激光并开始治疗。兴泰康鼻炎治疗仪主机芯片程序设定的是十分钟自动治疗时间，时间到后会自动停止治疗；建议每天治疗次数为2-3次，每次治疗时间应间隔3小时以上；每7天为一个疗程，新的疗程开始前请停用1~2天；每次治疗时间为：10~20分钟；10岁以下儿童和65岁老年人每次治疗时间建议选择5~10分钟；
- 5.治疗时间到，指示灯灭，自动停止治疗（如治疗中途希望停止治疗按动开关键即可），治疗时间到后，取出激光治疗头，用棉球蘸生理盐水或清水的擦拭清洁治疗头外透明壳（不要用酒精擦拭，否则可能导致透明壳的变色），将仪器放置安全处以备下次使用。

## 【主要特点】

兴泰康鼻炎治疗仪治疗鼻炎疗效好见效快，超过八成的患者鼻塞症状在第一次使用后鼻腔就会感觉通气状况改善，鼻道湿润，鼻痒、鼻塞状况有明显改善；

使用5~10天，鼻黏膜开始被修复，苍白或溃疡现象消失，色泽变得红润；

使用2~4周，炎症基本被吸收，鼻粘膜水肿消失，鼻道变得湿润通畅，鼻自然免疫力基本恢复，鼻过敏现象明显缓解；

使用三个月，鼻腔代谢功能彻底修复，免疫力恢复到正常水平，呼吸自然顺畅，彻底告别鼻炎、鼻过敏。

兴泰康鼻炎治疗仪100%不含药物和化学物质，治疗过程无须配合药物和手术，从根本上提升鼻腔组织自然排毒和免疫能力；

治疗过程无痛苦、无损伤、绿色安全、见效快、愈后不易复发；

产品体积小巧、携带方便，一键式操作，可以随时随地进行治疗；

免除药物和手术反复治疗花费高、副作用大的缺点，一人购买，全家享用；

最新推出的2011款兴泰康鼻炎治疗仪tm probeam机型采用进口金属激光器，治疗头的穿透力更深，疗效更好。

-----

#### 一、30天包换：

买家在收到货后30天内出现质量问题，包换货，双方各自承担发货运费；

#### 二、1年包修：

买家在收到货后1年内出现质量问题，厂家包修，来回运费由买家承担。

-----