

OPT+激光一体机

产品名称	OPT+激光一体机
公司名称	广州市逆维美容仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:逆维 型号:11 60mm:50mm
公司地址	广州市白云区鹤边员村南街5号5楼
联系电话	020---86281442 13512794027

产品详情

1.????????????????????????????5-10????

1) 色素性病变：雀斑、雀斑样痣、斑点样脂溢性角化病（老年疣和老年斑）、部分斑点样黄褐斑、斑痣、斑点样炎症后色素沉着等；2) 血管性病变：血管瘤、鲜红斑痣、面部或胸部潮红、单纯的毛细血管扩张症、直径小于3mm的静脉曲张；3) 嫩肤：祛除浅层皱纹、中等或重度皱纹的适度改善、收细毛孔、改善肤质，增加皮肤弹性、改善痤疮后遗症；4) 脱毛：全身各处不雅毛发，包括颜色较浅的细小毛发。5) 痤疮：各类痤疮和暗疮；6) 非剥脱性皮肤重建：e光可同时完成皮肤内的x轴、y轴、z轴三个方向多层次的表皮及真皮的重建，其独到的紧肤效果在一次正确治疗后，85%以上的患者达到满意程度，三次以上的紧肤治疗，患者一年内满意率达70%以上；激光治疗系统：激光色素治疗系统，采用宝石调q模式，激光瞬间发射高能量有效击碎病变组织里的色素，即光致爆破原理：激光积聚的高能量瞬间发射，1064、532nm波长的激光在极短时间内(脉冲宽度约10-20ns)瞬间达病变色素，相应色素团吸收光能受热极速膨胀瞬间爆破碎裂，一部分(表皮)色素团碎裂后在表皮代谢，一部分(表皮以下组织内)色素碎裂成可以被巨噬细胞吞噬的细小颗粒，被巨噬细胞消化后，最终通过人体内的淋巴循环排出体外，病变组织的色素将逐渐减少直至消失，而周围正常皮肤组织由于不吸收1064、532nm波长的激光，故几乎无损伤。由于被动调q激光不能调整单脉冲能量而只能调整脉冲个数，所以容易引起术后的热损伤及轻微瘢痕建议医生治疗时要特别注意。a) 激光系统的优势 1) 采用宝石调q模式,脉冲宽度约10-20ns；2) 专利的抗震陶瓷漫反射枪体，使用稳定性良好；3) 专用的yag晶体（特优级），单脉冲能量可达200mj，多脉冲能量可达1200mj；532nm激光头祛除红色素，1064激光头祛除黑色素，黑脸娃娃治疗头美白、嫩肤（配合碳粉进行治疗）；4) 专用脉冲激光氙灯、高功率水泵等优质配件保证了仪器的品质和连续工作性。b) 激光系统的适用范围：主要用于祛除部分内源性色素性皮肤病变、外源性色素性皮肤病及外伤性色素沉着。1) 内源性色素性皮肤病变：太田痣，伊藤痣，蒙古斑，颧部褐青色痣，咖啡斑治疗有一定的困难需多疗程反复治疗且患者术后满意度较差，脂溢性角化病、斑痣、交界痣、黑变病、蓝痣、炎症后色素沉着、部分黄褐斑等。2) 外源性色素性皮肤病问题：纹身，纹眉，纹眼线，纹唇线及外伤性纹身等色素性皮肤病变的治疗有不错的临床效果。e光修复理疗操作安全注意事项 操作时要记住，治疗头要离开皮肤时，松开治疗开关后才

能离开皮肤，（如果同时按着开关，治疗头离开皮肤，容易造成客户皮肤烫伤。）.操作时要根据顾客的敏感度来调节能量 操作时，治疗头要紧贴肌肤，手要压住治疗按钮。治疗头治疗时要垂直于皮肤表面，不能倾斜于皮肤表面 治疗头治疗处一定要涂有耦合胶

在敏感部位如颧骨或眼周时，力度要轻，治疗头只需轻贴皮肤就可以 每个治疗部位最多重复3到4次 禁止直接将酒精喷至治疗头进行消毒

操作时能量选择由弱到强，能量高，效果佳，以被称作承受范围内最高承受值为标准

严禁在喉头、眼球、太阳穴、鼻子等部位操作 在操作时，皮肤较薄及血管分布区域需谨慎操作

操作后部分客人皮肤微红属正常现象，半小时后自动退红 激光治疗 洗眉：建议术前将眉毛剃净，新眉在洗眉后2~4周长出。持枪稳定，枪口距离皮肤1.5~2厘米.枪斜角度不要过大。从眉尾开始光斑均匀叠加。洗眼线：洗眼线必须使用眼睑板。眼睑板使用前需使用75%酒精进行双面消毒，双面涂抹红霉素眼膏。插入眼皮与眼球之间，不要向下压迫眼球。眼线一般需2次以上治疗，治疗间隔不可少于1个半月。对痛感较重者可使用麻醉药。洗纹身：类似洗眉，枪口距离皮肤3~4厘米左右。第一遍治疗后可能出现反色，半小时后可对反色部分进行第二次治疗。

治疗中皮肤出现肿胀、起泡、出血、深层发红均数正常。 注意事项: 治疗中，切记不要直视激光源

治疗后，3—7日禁止描眉、水洗 注意防晒。 禁吃辛辣、海鲜等刺激食物。

出血较多、肿胀严重者可口服消炎药，或遵医嘱服用药物。

在病灶部位可涂抹红霉素眼药膏或有利于皮肤修复的芦荟膏等。