

便携式手臂式电子血压计，家用全臂式电子血压计

产品名称	便携式手臂式电子血压计，家用全臂式电子血压计
公司名称	河北昊众商贸有限公司
价格	298.00/台
规格参数	品牌:优乐康 型号:HK-601
公司地址	石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖大酒店南侧）
联系电话	0311-69004665 13933833732

产品详情

供应便携式手臂式电子血压计，家用全臂式电子血压计

供应便携式手臂式电子血压计，家用全臂式电子血压计

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

手臂式电子血压计

测量方法与传统水银血压计相近，测的是肱动脉，因其臂带放至上臂，其测量稳定性优于腕式血压计，更适合年纪较大、[心率不齐](#)

、糖尿病引起末梢血管老化等患者使用，缺点是没有手腕式电子血压计方便。

手臂式电子血压计的正确使用方法

静坐数分钟，将手臂穿入臂带并绑定

裸露手臂或仅穿薄衣进行测量；

臂带捆绑力度适中，以能放进一根手指为宜；

臂带中心处于心脏在同一高度；

臂带下方距肘关节1-2cm；

按用户键，即自动开始测量

测量时手掌放松，手掌向上；

测量过程中保持平静，身体放松；

勿在测量过程中说话，移动身体；

结果显示，手动关机或自动关机

测量完成后，显示血压值、脉搏值；

如特殊情况，将出现心率不齐提示；

数据自动上传至Boumi倍益知心健康管理平台；

测量完成后按任意键关机；

如忘记关机，血压计会在60s种自动关机；

语音电子血压计

概述：[语音电子血压计](#)

是在原有电子血压计的基础上加上了语音播报功能，解决了老年人看不清等难题，更为人性化。

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

供应便携式手臂式电子血压计，家用全臂式电子血压计

供应便携式手臂式电子血压计，家用全臂式电子血压计