

中山贝雅电子体重秤150kg超大称量口袋秤携带方便

产品名称	中山贝雅电子体重秤150kg超大称量口袋秤携带方便
公司名称	曾锐
价格	30.00/台
规格参数	品牌:贝雅 型号:迷你 称量范围:100g-150kg
公司地址	中国 北京市西城区 北京西城区地安门西大街
联系电话	86 010 83224528 13521276447

产品详情

品牌	贝雅	型号	迷你
称量范围	100g-150kg	外形尺寸	32*16
显示方式	液晶	供电方式	电池

基本特征： 电源：1*3v (cr2032)电池/采用高精度应变式传感器系统。小巧美观，携带方便。 最大称重：150kg/100g 最小称重：8kg 开机方式：重量开机自动关机时间：10s+(-2s自动零点追踪 三种单位转换：公制kg/英制lb/英制：st 开机低电压检测：低电压显示符号lo 超载出错提示：err使用说明： 把电源开关由“ off”位置推到“on”位置 拉出显示器。将称体摆好放于水平坚实的平面上。称体放置不水平，会导致称量不准。 人站上称体，显示人的重量，重量闪烁2次后自动锁定画面，约10秒后自动关机。称完后，重新震动开机，显示器显示0.0kg单位转换：称重前请先设置好单位，在称重时不能进行单位转换。单位转换：按动“ unit”键进行单位转换，单位依次是kg-lb-st出错提示： 低电压显示符号：当电池电量不足时，显示屏会显示” lo ” 符号2s后自动关机。出现“ lo ” 符号时请及时更换电池。 超载显示：当重量值超过超载值时，显示屏会出现“ err”注意事项： 正常称重时本产品仅受静压力。当非正常使用并受到撞击、打击、冲击或跌落时，很容易损坏称并且造成危险。 称重时要保持身体平稳，不要晃动身体。 不可以用化学溶剂来擦拭称体，必要时用沾水的湿布擦称，但应避免水进入称内。 称重时不要超过最大称量值，当物体的重量超过最大称量值很多时候会损坏产品的传感器。