

销4合1体温计红外线耳温枪额温枪婴儿电子体温计淘宝一件代发

产品名称	销4合1体温计红外线耳温枪额温枪婴儿电子体温计淘宝一件代发
公司名称	深圳市嵘丰科技有限公司
价格	39.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:好吉祥 型号:IT-201
公司地址	广东深圳市宝安区福永街道桥南新区136栋
联系电话	86-075527460837 13652373394

产品详情

可测耳温，额温，环境温度，有时钟功能。快速精确检测，瞬间1秒钟可获结果，测温速度和精度都比一般产品有明显提升。

建议事项：

- 1.留在耳道中过多的耳垢、测额温时如果额头留有汗水都可能造成测量结果偏低，所以在测耳温时务必保持测量者的耳道清洁，测量额温时保持额头没有汗水及化妆品。
- 2.前后两次测量环境有较大的变化（如从室内到室外），请在新环境中等待30分钟后再进行测量。
- 3.连续的测量时请间隔一分钟，如果必须进行短时间连续测量，读取温度值间可能有些微误差属于正常现象，此时建议取平均值。
- 4.人体温度无绝对标准值，请尽量采集平时的个人体温测量记录，以作为发烧与否的参考。

温馨提示：

- 1.红外耳温枪是专用于测量人体耳道的温度，与普通电子体温计相比，气测量原理与测量部位均不同，因而不可能获得相同的测量值，以下是判断体温的重要观念：
 - a)体温的正常值是一个范围，不是一个特定不变的值，每个人的体质不同体温也就不同；
 - b)正常的体温，在身体不同部位测量到的都不尽相同，不应用来相互比较，其中耳温最准确，最灵敏；
 - c)体温会随着年龄、性别、时间、运动、情绪等变化而变化；

d) 可在您及家人身体健康时测量体温，以便将来发烧时做比较。

2. 红外耳温枪是一种高科技，高灵敏度的测量仪，在使用过程中，对操作环境，测量方法（是否对准耳鼓）均有较高的要求，所以容易造成人为的测量不准而非仪器本身的问题，具体注意事项：

a) 红外线耳温枪必须在操作环境下稳定30分钟后方可测；

b) 耳温枪的测量头应尽量深的插入耳道以便贴进耳鼓；

测量部位正常温度范围

耳温35.8到38.0度

口温35.5到37.8度

腋温34.7到37.4度

肛温36.8到38.0度

额温34.8到37.4度

本产品的加工定制是是，品牌是好吉祥，型号是IT-201，测量范围是0-100（ ），精度是正负0.2（f.s），距离系数是0.5cm（ ），外形尺寸是12*4*2（mm），电子体温计是多功能电子体温计