

中卫生巾的配送佳品--阴道炎检测试纸

产品名称	中卫生巾的配送佳品--阴道炎检测试纸
公司名称	南通协和生物科技有限公司
价格	2.00/盒
规格参数	包装规格:1人份/袋 材质:试纸 种类:检测卡
公司地址	南通市崇川区崇川路1号9幢一楼
联系电话	18912266498 13813721999

产品详情

包装规格	1人份/袋	材质	试纸
种类	检测卡	包装	铝箔袋单独包装
产地	南通	纸品等级	优级
重量	23（g/m2）	型号	Y-007

姐妹牌阴道炎自我检测卡，是一种经济、实用、方便、快速、高效的卫生医药保健产品。它以预防测试为主，是以检测妇女生殖健康状况来达到预防和保健的新一代产品，她将进一步推进我国妇女保健。产品有超前性、新颖性和保健性。

阴道炎自我检测试纸通过简便直观的办法，可以让使用者在30秒内知道自己是否患有阴道炎及炎症的轻重程度:正常、轻度炎症、严重阴道炎。

包装：1人份/袋

产品组成：一张炎症对色卡，一片症状试纸、一支消毒医用棉签。

使用方法：

用棉签直接取女性阴道口处分泌物涂在试纸上，约30秒在正常的光线、温度下与色卡进行比较，即可得出结果：正常、轻微炎症或者重度炎症。

注意事项：

- 1、糖尿病患者、使用激素类药物者及月经期和孕妇不适合用本产品。2、将分泌物涂到试纸上后，请在

正常光线下30秒内对照结果，测出炎症后请及时到医院诊治。3、使用前24小时内应避免性生活，不要清洗阴道或盆浴、不要使用药物。

4、本品只供一次性使用，只能用于阴道内分泌物的检测，不适用于其它溶液的检测。

5、开封后请立即使用。密封、避光、防潮保存。检测结果仅供参考。产品有效期三年。

各种阴道炎的危害：

1、滴虫性阴道炎可并发滴虫性尿道炎、膀胱炎、肾盂炎，由于滴虫能吞噬精子，可引起不孕症，影响性生活等。2、霉菌性阴道炎不易根治，易反复，可引发早产、胎儿感染畸形等3、宫颈糜烂可引发阴道粘连，阴道积脓或宫腔积脓。4、非特异性阴道炎可引发阴道粘连，阴道积脓或宫腔积脓，易引起盆腔炎，胎膜早破和绒毛膜羊膜炎等。5、老年性阴道炎可引发阴道粘连，阴道积脓或宫腔积脓。6、细菌性阴道炎可诱发生殖器感染，盆腔炎、肾周炎等。