

# 康敷特远红外中药热敷护腰理疗仪腰带

产品名称	康敷特远红外中药热敷护腰理疗仪腰带
公司名称	深圳市联迈达电热制品有限公司
价格	228.00/件
规格参数	品牌:康敷特 型号:RF-13002 颜色:灰色、蓝色、橙色
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖镇永华街1号2栋2楼
联系电话	0755-29420366 15977884575

## 产品详情

### 产品信息

名称：康敷特腰舒带

型号：RF-13002

电压：12V

功率：18W

温度：40-60度

材质：高档超柔布

适合腰围：70-100cm

重量：0.54kg

颜色：灰色、蓝色、橙色

功效：对腰椎骨质增生、腰椎间盘突出、强直性脊柱炎、腰椎退行性病变、压迫坐骨神经痛、腰肌劳损等康复有较强的调理作用。

## 使用方法

- 1、首先将药包用50度以上的烈酒淋湿（注意不能有酒滴）；
- 2、将淋湿好的药包装入康敷特腰舒带的内袋
- 3、将康敷特腰舒带两边魔术贴包裹在腰围上直接与皮肤接触
- 4、插上康敷特腰舒带上的连接电源
- 5、插上主电源
- 6、长按康敷特腰舒带数码调节开关3秒，启动开关灯点亮
- 7、康敷特腰舒带数码调节开关系统扫描3秒钟后变红色，进入快速加热模式。6分钟后快速加热完毕，自动进入中档温度
- 8、选择适合自己的温度，红灯时60度、蓝色50度、绿色40度
- 9、躺在床上、坐在沙发上享受灸疗
- 10、每天灸疗至少3-5小时，（也可入睡时整夜连续敷）。您如果灸疗完毕，只需长按三秒关闭电源，指示灯灭。

## 注意事项

- 1、婴幼儿、对热不敏感的人不适宜使用本产品
- 2、局部红肿热痛者、手术后伤口未愈合者不宜使用
- 3、患有传染性疾病的患者使用本产品时，要单独使用
- 4、心脏病患者请到医院检查属于心功能衰竭期或冠心病心肌梗塞期不宜使用
- 5、孕妇禁用

## 6、使用本产品时，应保持皮肤清洁，以减少洗涤次数

售后服务：自购买日起一星期内如发现产品有任何质量问题,凭销售凭证可免费进行同型产品更换，在一年内按参考正常使用发生故障,公司将为您提供保修服务(注:布料和织物不在保修范围)维护或使用不当,私自拆卸或不可抗拒力因素及未按说明书操作,导致产品故障或损坏,则不在售后保证服务范围,如需维修将酌情收取工本费用,如要更换零配件,将按零配件实际成本收取费用，产品因故障维修请到当地购买商店售后服务点，或正规技术部门检测维修如需返厂维修的产品,经公司技术部门鉴定产品质量出处后,公司只负责单程物流费用,如非出厂问题公司则不负责物流费用。