

血压计[电子血压计] 全自动腕式语音血压表 高血压测量血压仪器

产品名称	血压计[电子血压计] 全自动腕式语音血压表 高血压测量血压仪器
公司名称	深圳市吉富源科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 328.00 品牌:长坤 型号:102s
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗镇塘下涌智芯茂科技园
联系电话	0755-88217265 18025339017

产品详情

注明：此款为非语音款电子血压计、谢谢！

细介绍:60次记忆功能，单键式开/关，大显示屏，智能测压。一款是今年的新包装，如没说明，我们会随机发货

使用说明：希望能够早、中、晚1日测量3次，早上起床、心情舒畅时，大小便数分钟后，没有尿意时。测量前做几次深呼吸，心情放松，避免重复测量，坐在椅子上，背挺直，臂带要绑紧，臂带与心脏处于同一高度。

注意事项：避免在运动前后，饭后1小时内，饮酒、咖啡、红茶前后，入浴前后以及吸烟前后进行测量。

保修期12个月，pvc材质。纸盒装包装，内有血压计、保修卡、说明书。包装长7.86cm，宽4.7cm，高7.1cm。

避免以下的时候测量：

1、运动前后2、饭后1小时内3、饮酒、咖啡、红茶前后4、入浴前后5、吸烟前后

正确使用手腕式血压计：

1、将血压计紧缠于左手手腕上；2、将腕带套在从手掌到手腕距离10—15mm处（即一食指宽）；3、请不要把袖口卷在内；4、抓着腕带的下端边拉边紧贴手腕卷上，如不贴紧可能会使测量误差偏大；5、将腕带余下部分折回卷好，则腕带下端不会造成累赘；6、如使用右手测量亦请重复同样动作，但由于左手离心脏较近，强烈建议测量时选用左手，以减少误差；7、手腕腕带与心脏的高度（乳头的位置）相同。

本产品的建议零售价是¥328.00，品牌是长坤，型号是102s，电源方式是交流电，测量范围是20-220，脉搏准确度±是3，适用工作温度是室温，显示方式是液晶显示屏，适用部位是手腕式，压力准确度±是3，重量是0.32，自动关闭功能是有，加压模式是全自动，加印LOGO是可以，额定功率是6，额定电压是3，加工定制是是，动力模式是电动，规格是90*90*90，颜色是银灰