

供应调Q激光，去斑专用美容仪，去斑效果好的仪器

产品名称	供应调Q激光，去斑专用美容仪，去斑效果好的仪器
公司名称	郑州施得医疗科技有限公司
价格	99800.00/台
规格参数	品牌:施得 型号:3333 包装:木箱
公司地址	郑州市郑东新区如意东路9号5号楼8层57号
联系电话	0371-61770936 18530915787

产品详情

电光调Q

概述：

由于现代人的生活节奏越来越快，生活和工作的压力越来越大，越来越多的女性深受黄褐斑的困扰，医生也为能够解决褐斑的问题做出无数种的尝试，电光调Q激光仪器的上市，有效的治疗黄褐斑，终结了“谈斑色变”时代，同时，该设备同样能够帮助患者解决皮肤的多种内源性色素的问题，包括颧部褐青色痣、太田痣、伊藤痣等，以及其他设备洗不掉的纹身。它现已为数万计的色素性疾病的患者解决色斑问题，使他们重拾生活新希望

电光调Q，色斑终结者

蔓延在脸部的色斑，让女性的皮肤看起来毫无活力和光泽，久治不愈的色斑更让女性失去自信和魅力。被称为色斑终结者的电光调Q激光美容仪器一上市便凭借其高能量、短脉宽、大光斑、治疗安全有效且彻底、痛感轻等优势得到客户的一致好评。施得公司在研发生产祛斑仪时就剑指色斑，因此才成就了电光调Q激光美容仪的一身荣誉。

一、治疗范围：

黄褐斑、太田痣、颧骨褐青色痣、雀斑、老年斑、咖啡斑等内源性色素皮肤问题；洗纹身、纹眉、唇线、眼线等外源性色素问题。

二、治疗原理：

取逐步分解、慢性拔脱的方式进行治疗。利用激光穿透性好的特点使激光穿

的基底层和真皮层，直接作用于黄褐斑进行分解。通过多次治疗逐步拔脱色
祛除色斑。同时激光的光热作用刺激真皮，加强血液循环，胶原新生。使皮
泽，恢复细腻紧致与弹性。

祛除外源性色素的原理：利用激光瞬间发射的高能量，使被照的色素颗粒吸收能量膨胀破裂，一部分裂
变成更加微小的碎粒排除体外，另一部分被人体巨噬细胞吞噬并通过淋巴系统代谢，从而祛除色素。

四、技术优势：

- 1、高质量光源，能量精确稳定输出，采用电脑控制系统，精确操控激光的输出能量。
- 2、高质量可调高帽式光斑：能量分布均匀无强点，对皮肤损伤小、风险低。
- 3、适应范围更广泛：对浅表性色素、真皮性色素问题、内源性色素及外源性色素问题均可有效治疗。
- 4、快速治疗模式，提高效率：每秒10Hz的快速出光频率，大大缩短了治疗的时间，降低操作者的工作强度，也节省了患者的时间。
- 5、关节式道光臂，操作更灵活：系统采用犹如人体手臂的关节式导光臂，操作时可以灵活拉伸，充分满足不同治疗部位的需要。
- 6、强劲冷却装置，保障系统24小时不间断工作。

五、注意事项及禁忌：

- 1、光过敏体质的人群、皮肤有疱疹感染以及大面积破损、孕妇、严重的心脏病、糖尿病和高血压、癫痫
病等禁做；
- 2、有晒黑史或即将接受暴晒的人群，谨慎治疗；
- 3、色斑接近于肤色的患者或期望过高的患者；
- 4、患者戴上防护眼罩，操作者配戴激光防护镜；
术前应对治疗部位进行清洁，治疗器具给予消毒；
操作时治疗手柄应垂直于治疗部位（与皮肤成90°角）。

六、仪器的保养与日常维护

- 1、探头的安装,要求连接处不可虚接,否则易造成短路,造成故障。
- 2、每次使用完毕时,枪头要清洁干净,放置安全的地方。
- 3、每台仪器注水时要加满,每次钥匙开机后,观察到水充分流动后方可进行下一步操作。
- 4、如使用时光头手柄处漏水应立即停机。
- 5、本仪器长期不用时：请将仪器内的水彻底排除干净，防止残留水腐败，腐蚀污染仪器的水循环系统和
损坏器件，将仪器钥匙从钥匙开关上取下并关闭紧急开关。

6

、不要用汽油、酒精、稀释剂，或经化学处理的抹布擦拭机箱表面，因为这样会损坏机箱表面，使机箱表面涂层剥落。

7、清洁仪器表面及治疗室时，请注意不要扬起灰尘，以免其进入仪器内部，影响光学系统正常工作。

8

、本仪器内部结构复杂，几乎没有用户自己能够维修的部分，发生故障时请您务必与本公司售后服务部门联系。