

供应韩国进口水光，水光注射美容

产品名称	供应韩国进口水光，水光注射美容
公司名称	郑州施得医疗科技有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:施得 型号:6666 包装:木箱
公司地址	郑州市郑东新区如意东路9号5号楼8层57号
联系电话	0371-61770936 18530915787

产品详情

水光注射仪

水光注射是现代最先进的美容方法和尖端生物基因产品的完美结合。由电脑调控利用超微渗透技术，将各种细胞能量剂及营养素采用密集微针精超微渗透技术，突破皮肤吸收壁垒，定位、定层、定量地直接输送到皮肤所需的层面，快速唤醒细胞再生机能，重现修复皮肤枯萎断裂的细胞，从而达到除皱、嫩肤、紧肤的目的。

一、功效

1、保湿补水 2、美白嫩肤3、抗衰祛皱 4、紧实提升

二、界面调节

1、计数器显示

2、注射器类型：5ml注射器

3、声音 开/关

4、重置注射计数:可归零

5、注射深度：1.0—2.0之间，额头和法令纹可用0.8；第一次操作用1.0，第二次1.2—1.4，第三次1.6—2.0，每次可加深0.2；角质层厚的第三次最多放在2.0。

6、运作模式INT和CON:放在INT自动模式即可

7、药物剂量：15—20

8、粘质程度：放在4即可

9、真空度：放在4即可

四、水光注射周期

水光注射所维持的时间与接受注射的次数相关；第一次注射后维持的时间较短，约维持1-2个月左右。连续进行三次水光注射后，效果可以维持2年左右，但根据个人体质，肤质，生活习惯维持时间也会有所差异。水光注射第一次注射后1个月后进行第二次的注射，而第二次与第三次注射间隔的时间为3个月。

一次水光注射=1000次普通面部护理高浓度透明质酸,含有体内200-300倍的水分,能吸收500-1000倍于自身体积的水分,是美容界最强的保湿物质,补水锁水效果更为理想.

五、准备物料

医用酒精、碘伏、生理盐水、无菌纱布、棉签、5ml注射器、水光注射针头、三通、口罩、一次性手套、医用白大褂

六、水光注射=透明质酸+N种选择

利用负压的多头针在皮肤的真皮层注入透明质酸（补水、锁水、润滑肌肤）+肉毒素（祛皱、提升）+胎盘素（提升、收紧、抗衰）+维生素C（美白、淡斑、收细毛孔），使皮肤容光焕发，湿润光滑，永远保持年轻态。

注：第一次治疗只能用透明质酸+VC打底；第二、三次可融合其它。

七、水光注射操作流程

- 1.清洁面部；再用生理盐水进行清洁；
- 2.用医棉签加碘伏进行消毒，再用生理盐水将碘伏擦拭干净；
- 3.操作治疗，操作时避开法令纹及上唇部；
- 4.操作出血时用无菌纱布加生理盐水进行擦拭；
- 5.治疗后敷镇定凝胶20—30分钟。

九、禁忌、注意事项

- 1.48小时不沾水，三天后敷补水面膜
- 2.疤痕体质者禁做
- 3.经期、孕期、哺乳期禁做
- 4.糖尿病、高血压、心脏病禁做
- 5.一周内禁吃辛辣食物（葱姜蒜等）、酱油、醋、海鲜、羊肉等，禁烟、酒。