

多功能坐姿矫正器就是好用

产品名称	多功能坐姿矫正器就是好用
公司名称	郑州金眼睛健康咨询有限公司
价格	28.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路112号7号楼1单元5层5号
联系电话	0371-63912988 18637181895

产品详情

顶胸式坐姿矫正器组装方法：

- 1、首先打开包装；
- 2、准备好所有配件
- 3、顶胸托和喇叭基座组装好
- 4、根据桌面厚度调节夹桌螺扣，把夹桌基座组装上去并拧紧
- 5、组装上喇叭基座
- 6、可根据舒适度调节顶胸托的高度，组装完成

支撑式坐姿矫正器组装方法

- 1、首先打开包装
- 2、准备好所有配件
- 3、组装好桌夹底座
- 4、装上连接杆（注意前后方向）
- 5、喇叭基座装入连接杆时，必须用手指抠住弹力锁扣才能进入

上升喇叭基座可以直接拉动上升

下降喇叭基座需要抠住弹力锁扣才能下降