

威海华诚医疗,医用加湿鼻氧管,一次性使用加湿鼻氧管

产品名称	威海华诚医疗,医用加湿鼻氧管,一次性使用加湿鼻氧管
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:AR1585
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

产品详情

一次性使用加湿型鼻氧管装置：

1、整套无菌

湿化瓶、湿化液、鼻氧管密封包装后整套经辐照灭菌，真正做到无菌湿化吸氧，避免院内感染

2、进气口

一次性拧断密封装置：密封湿化瓶口防止细菌进入，方便医护人员操作

3、减压阀

在正常吸氧状态下，减压阀是封闭的，当气体堵塞导致瓶内气压超过临界压强时，保护膜随即破裂，通过减压阀外塞排除气体，保持瓶内气压正常，防止湿化瓶爆裂，确保安全

4、纳米微晶过滤静音器

0.2um微孔过滤，能够有效滤除氧气中的杂质、细菌；氧气通过分割成无数小气泡后浮出

无菌水面，减少噪音，使患者能够安静吸氧

5、快插式气动接头

6、全密封锁扣装置

利用防盗锁扣原理，使湿化瓶体和上盖一次性全密封无缝闭合并锁住，确保湿化液不受外环境污染

7、湿化液

湿化液为无菌水，不含任何抑菌添加剂卫生部《医院感染管理规范》及《卫生部办公厅关于加强非结核分枝杆菌医院感染预防与控制工作的通知》规定:氧气湿化瓶的湿化装置应使用无菌水

8、鼻氧管

多种规格，鼻导管内壁为多条凹形槽结构设计，导管弯曲亦不会堵塞气体，可正常吸氧；

鼻导管长达3米，方便病人吸氧

一次性使用氧气湿化瓶

【结构组成】湿化瓶体、湿化液、鼻导管、鼻塞/面罩组成。

【适用范围】

鼻氧管用于临床与输氧系统配合向患者输入氧气。

【使用说明】

本产品应由专业人员操作使用，使用本产品的医护人员应经过相应技术的培训，使用时应采用无菌技术操作。

【注意事项】

1. 本产品经环氧乙烷灭菌，且只限一次性使用。产品在包装未打开或破损前均为无菌、无毒和无热原。若包装破损，禁止使用。用后销毁。
2. 本产品应贮存在相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。
3. 在规定的运输和贮存条件下，产品自灭菌之日起，有效期为二年。产品超过灭菌有效期，不得使用。
4. 医生在使用鼻氧管时应注意检查鼻氧管的通畅性。

威海华诚医疗一次性使用鼻氧管说明：

鼻氧管的主导管采用内六角形防压瘪技术，避免了在使用时因导管打折压瘪所导致的氧气不畅通的情况发生。

鼻氧管的接头按照使用情况可分为接中心供氧，接氧气瓶等规格口径的型号。

鼻氧管的鼻架采用定制的软材料制作。

我公司生产的鼻氧管产品因质量可靠，使用方便而深受广大用户的信赖。