

能量激活枪CT-500

产品名称	能量激活枪CT-500
公司名称	青岛世纪杰创医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:01M 型号:CT-500 产地:韩国
公司地址	青岛市高新区松园路17号青岛工业技术研究院B1区4楼
联系电话	0536-8098666 18765685215

产品详情

一、主要功能及特点：

通过电磁的方式垂直作用于治疗部位。

通过变换三个枪头，方便治疗身体的各个部位。

设备可数字显示精确的冲击能量，以方便指导操作者使用

设备治疗时1-10HZ连续可调，可适用于不同的患者。

方便的作用，自动模式均可用来对患者进行治疗。

设备能量控制精确，可用来进行对肌肉、韧带进行精确的治疗，

电磁的能量可以根据的患者的具体情况进行高中低的调节。

设备通过其自身的温度传感器来确保冲击能量的安全性。

二、指导：

在电压为220V时打开并运行设备。

根据患者的情况选择适当的治疗头。

先选择冲击波频率再选择冲击能量（低、中、高）

长按开始键5-10秒，开机。

不要在一个点冲击时间长于2分钟，会对肌肉以及韧带造成伤害。

正常情况下：选择低、中能量进行身体上半部分的治疗，选择高能量进行身体下半部分的治疗。

按开始键结束治疗。

三、注意：

在高能模式下，治疗时间不要超过5分钟。

此设备并不是按摩器，如果您连续使用此设备，系统就会因高温而强制停止运行，这是正常现象，您可以在设备温度恢复正常之后，继续进行使用。

此设备不可用于儿童。