

治疗静脉曲张袜，治疗袜，美腿袜，康复袜，减压袜

产品名称	治疗静脉曲张袜，治疗袜，美腿袜，康复袜，减压袜
公司名称	邯郸市鼎康科贸有限公司
价格	182.00/套
规格参数	品牌:沃尔科 部位:腿部 型号:中压小腿型
公司地址	中国 河北 邯郸市 丛台区通达街8号通达名园8号楼2单元7号
联系电话	86 0310 6183479

产品详情

品牌	沃尔科	部位	腿部
型号	中压小腿型	产地	河北
箱装数量	40	贸易属性	内贸

国家专利产品 沃尔科牌医用弹力袜产品说明书 一 医用弹力袜的治疗原理

在正常的情况下，人体腿部的大隐静脉压为5-10mm hg，小隐静脉压为8-12mm hg，但因地心引力与肌肉疲乏的关系，致使血液回流不理想静脉压力持续升高，血液滞流末梢血管，部份静脉瓣壁负荷过重而产生异常的扩张与曲折而在皮下浮显如蚯蚓般或网状突出，这就是表面浅性静脉曲张。沃尔科医用弹力袜由氨纶丝配合其它材料织成，具有高度的双向弹性，藉由其特殊设计的渐进式压力由脚踝处渐次向上递减，收缩小腿肌肉，既压迫脚部静脉血液上流使之参与正常的血液循环，使血液回流心脏，又不会影响腿部动脉血液的正常循环，达到治疗及预防静脉曲张的作用。

该产品已被授予国家专利，专利证书号为：zl200320126872x 二、医用弹力袜的特性和功能 1

有效预防静脉曲张的出现 2 有效治疗静脉曲张的症状 3

根据“静脉血液动力学”原理,采渐进式分段压力设计,可防止腿部疲劳、酸痛及肿胀 4

可促进腿部血液的循环，增强腿部肌肉的弹性 5

以温和的压力对血管加压，帮助下肢血液顺畅流回心脏，促进血液循环 6

修饰美化腿部曲线，保持健康肌力，促使腿部曲线苗条 三、适宜人群 适宜静脉曲张患者，以及长期站立、行走、静坐工作者，例如医护人员、老师、孕妇、美发师、驾驶员、长途飞行家，或行动不便、老人及开刀手术后血液循环不良者。长期站立工作者 因腿部静脉血液受地心引力影响积存于下半部，造成腿部沉重疲倦或肿胀，严重者甚至静脉浮出（俗称浮脚筋），借着医用弹力袜可顺利的将血液挤压回流心脏，进而改善以上症状。长途飞行家—飞机内座位小、活动空间狭小，尤其以经济舱更为多见。这时旅客的脚踝、膝部到大腿骨只能呈三个九十度的弯曲，降低了全身的血流速度，又因飞机内空调的关系，使空气干燥，人体在此环境下很容易脱水，血液粘稠度就会增高，导致发病。一般来讲，长途飞行5个小时以上的坐姿旅行，应穿医用弹力袜，防止静脉血栓症的发生。怀孕时期妇女 因为体重增加，腹压变大胎儿压迫腹部静脉，阻碍静脉回流容易产生静脉曲张，穿上医用弹力袜不仅可预防静脉曲张，更可

减轻腿部水肿情形。

老年人 因活动量少，造成血液流动慢或心脏无力，穿上医用弹力袜后可促进血液循环。

手术后或烫伤病人 能有效进行伤口收缩促进生长新皮肤。

有美腿需求者—收紧腿部肌肉，美化腿部曲线

五、如何适当穿着医用弹力袜

正确的穿着时间是在清晨起床前，因为此时血液循环最为畅通，肿胀尚未开始；或者先将患肢抬至高于心脏水平5分钟，以利血液循环。具体穿着步骤如下：1

将弹力袜沿上端外翻，然后由脚面部位穿上，慢慢拉至脚后跟部位，再拉过足踝部 2 手指拉住弹力袜之前缘，顺着小腿往上拉，使其务必能紧贴着腿肚部位，直拉至膝关节下处(小腿型)或大腿跟部(大腿型) 3 同上由 1 至 2 ，将另一只医用弹力袜穿著在另一只脚上，直拉至膝关节下处(小腿型)或大腿跟部(大腿型) 4 注意穿着时，应顺着医用弹力袜的纹理 5 若穿着后，整天腿部受压迫而无减轻疼痛之迹象或头晕时，可能是所穿产品压力过大，此时应改换较大型号的产品或低压产品，并请教专业医师

六、注意事项

依照袜子的结构逐渐向上直至完全舒适地穿好，使压力均匀颁布在腿上，切勿粗暴用力或遗留死褶。

最好是两只医疗弹力袜轮流穿着，可延长使用寿命，保证良好的治疗效果 切记晚上睡觉时不必穿着

请在专业人士指导下使用

七、如何保养弹力袜

因为弹力袜会吸汗，所以要用中性肥皂或温和洗涤剂清洗，水温不要超过40度，用双手轻轻搓柔数下即可，不可用力过猛，以免伤害其弹性纤维；然后以清水冲涤，洗净后，吊挂凉干。请勿用力拧绞或放在强转速之洗衣机内清洗。