

软热宝远红外线腰腹带 科学仕

产品名称	软热宝远红外线腰腹带 科学仕
公司名称	滨州创元设备机械制造有限公司
价格	199.00/个
规格参数	品牌:科学仕 型号:/ 产地:/
公司地址	滨州市开发区黄河八路以南开元路以西
联系电话	0543-2290226 15854361787

产品详情

品牌	科学仕	型号	/
产地	/	箱装数量	/

~ 软热宝远红外线腰/腹带 ~

使用说明书

科学仕牌软热宝远红外线腰/腹带系列产品系采用日本最新技术，利用微波炉加热使得特殊成分凝胶可持续长时间保温和释放远红外线。它由天然矿物质，炭粉等科学配制而成，无毒无害。环保节能。

一.使用方法

取出内袋,如有需要可以用清水清洗表面并擦拭干净.放入微波炉内,每次加热不超过1分钟;如不够热,再加热几次。参考标准500w中火2-3分钟。取出放入特制腰(腹)带即可使用。使用习惯后,可以直接连同腰/腹带放入微波炉加热后即可使用。

二.主要用途

1.抗寒保暖:

本品质地柔软,可任意揉捏;适宜全身各部位保暖;热敷,暖关节,暖手防冻,预防冻疮.户外工作可随身携带;保持持久温暖。

2.热敷理疗:

本品采用tpu材质(热塑性聚氨酯),作为帖腹材质,透气性好,不渗漏,耐磨耐压,可贴腹/腰使用.局部热敷可使血管扩张,恢复肌肉,肌腱的疲劳,如伏案工作带来的肩颈疼痛;解除肌肉的痉挛,消除肌肉僵直或痉挛引起的疼痛(如腰肌劳损,胃肠痉挛);胃部热敷还可以促进肠的蠕动,消除腹部胀气;经期保暖可有效缓解痛经!

三.使用注意事项

- 1.如遇袋子破裂请立即停止使用,请勿用尖锐物品割,划!
- 2.使用前请将微波炉上的油污擦拭干净
- 3.微波炉功率越大,加热时间越短!不要过度加热.
- 4.加热一次,常温下可持续保温2-4小时
- 5.如没有微波炉,可将其煮沸使用,煮沸时间10分钟后保温时间约1小时
- 6.不使用时,放置干燥处常温保存即可
- 7.请远离婴幼儿!