

MY-600D美容仪器 超声波深层清洁 水雕磨皮祛疤嫩肤美容仪（2）

产品名称	MY-600D美容仪器 超声波深层清洁 水雕磨皮祛疤嫩肤美容仪（2）
公司名称	河南星维庆医疗器械有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	建议零售价:4000.00 品牌:可木 型号:MY-600D
公司地址	郑州市中原区伊河路136号光合大厦19楼1913
联系电话	17266030525

产品详情

my-600d美容仪器 超声波深层清洁 水雕磨皮祛疤嫩肤美容仪

工作原理：

利用全智能程序控制的真负压模式，通过产品和设备的完美结合，在短时间内深层清洁表皮和毛孔内的脱落角质，粉刺，黑头及其他污垢。同时提升产品的营养成份深层吸收，促使毛孔收细，平滑肌肤，增加皮肤的保湿性，更能使肌肤呈现水嫩净白，水润饱满的质感。

铲型清洁美容仪，通过高频振动进行深层按摩，在脂肪运动的同时改善微循环，使脂肪细胞燃烧、裂解转化为代谢产物排出体外，从而达到清洁的效果。采用特制铲型探头，能有效进入肌肤下4-7公分，通过音波的震动让专用美容液变细，雾化，能将这些污垢与多余的皮脂加以乳化，使堵塞在毛孔内的化妆品残渣，污垢乳化，并随着四溅的水花消除，这种清洁效果更快速、更有效。这就是像洗净精密机械的超音波洗净器一样，此种现象也会发生在皮肤上。从而去除废物，角质层，脂肪粒，青春痘等等，让你的保养品中的养分从此不再浪费，从而让肌肤更好的吸收。是清洁肌肤的好帮手，让你的肌肤更健康，更明亮，透气性更好。

治疗范围：

- 1、痤疮、脂溢性脱发、毛囊炎、清螨、清除皮肤过敏源.
- 2、皮肤美白、改善皮肤晦暗、暗黄、改善肤质.
- 3、深层清洁皮肤、同时给皮肤补水、补养。
- 4、去黑头、改善皮肤松弛，收细毛孔，增加皮肤透明度.
- 5、用于剥脱性皮肤重建术和非剥脱性皮肤重建术的术前术后护理。

深层清洁、清除老化角质； 色素分解、淡化黑斑；
深层除皱、增强皮肤弹性； 促进血液和淋巴新陈代谢；
增强皮肤细胞的再生能力及通透性； 按摩皮肤、营养导入、杂质导出；
对皮肤没有任何的损伤与副作用；

超声波铲皮：

利用每秒28000次的超频振动，改善血液及淋巴循环，导出肌肤污垢离质，亦具有导入功能，增强保养品的界面活性，发挥以下功

深层清洁--导出功能

铲皮刀采用超声波和纳米技术，以每秒4万多次的频率运动振动，将毛孔的污垢雾化后向上导出皮肤。达到彻底清洁皮肤的目的。

深层滋养--导入功能

喷适量容易，将铲皮刀的探头保持45度角向下缓缓拉动，利用每秒4万多次的振动，深入皮肤4至7毫米，在脂肪运动的同时改善微循环，使脂肪细胞燃烧，裂解转化为代谢产物排出体外，在按摩的同时具有彻底清洁的效果。而且可以和日常化妆品一起使用，美容效果更显著。

水雕磨皮:

利用全智能程序控制的真负压模式，通过产品和设备的完美结合，在短时间内深层清洁表皮和毛孔内的脱落角质，粉刺，黑头及其他污垢。同时提升产品的营养成份深层吸收，促使毛孔收细，平滑肌肤，增加皮肤的保湿性，更能使肌肤呈现水嫩净白，水润饱满的质感。

钻石水雕:

通过刺激皮肤生长层吸收氧气和促进血液循环，加速皮肤组织发育，促进胶原蛋白及弹性蛋白的生长，调理肤质及重健康肌肤；改善堆积老化角质、粗糙及老化肌肤；改善肌肤细纹及松弛的现象；淡化表皮层浅斑；改善毛孔粗大、痘疤及凹洞；刺血液循环及新陈代谢。结合适当的护肤程序。使用于各种皮肤，敏感肌肤亦可使用。脸部功效：色素沉着症、角质肥厚症、任何疤痕、暗疮；油性、毛孔粗大；老化、新陈代谢差；身体功效：妊娠纹；全身角质老化；肥胖症

注意事项：

- 1.请不要在有破损的皮肤上操作。
- 2.要及时清理废水回收瓶内的水，以免因溢满令废水倒流而造成机件损坏。
- 3.各型号的水雕磨头可直用清水冲洗，然后用75%酒精浸泡。

禁用人群：

- 1.发烧、患传染性、急性疾病的人的
- 2.出血性疾病或外伤、皮炎、皮肤病毒

售后服务：

工厂直销，保修一年，如在一年内有任质量问题由工厂提供免费维修服务，此外工厂将会提供仪器终身维护。

欢迎各经销商，批发商，oem，odm及各地美容院前来订购。

我们的合作快递公司 是顺丰，申通，圆通等

本产品的建议零售价是4000.00，品牌是可木，型号是MY-600D，规格是45*46*29cm，功能是深层清洁毛孔收细祛角质，适用对象是脱落角质，粉刺，黑头及其他污垢，上市时间是2014，颜色是白色，产品规格是台式真负压模式，毛重是15kg