

销售温灸器 内贸 北京 9000

产品名称	销售温灸器 内贸 北京 9000
公司名称	北京圣安康悦医疗器械有限责任公司
价格	38.00/个
规格参数	贸易属性:内贸 产地:北京 箱装数量:9000
公司地址	中国 北京市 北京市朝阳区酒仙桥四街坊6号院
联系电话	86 010 64318700/64385091 13901312349

产品详情

贸易属性
箱装数量

内贸
9000

产地
品牌

北京
圣安康悦

<!- .at_5{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-char-indent-size: 10.5pt}
.at_2{font-size: 16pt; font-family: 黑体; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at_0{font-size: 16pt; font-family: 黑体; mso-bidi-
font-size: 12.0pt; mso-hansi-font-family: 宋体} .at_6{font-family: 宋体} .at_4{font-size: 12pt; font-family: 宋体}
.at_7{margin: 0cm 0cm 0pt 31.5pt; text-indent: -31.5pt; mso-char-indent-count: -3.0; mso-char-indent-size: 10.5pt}
.at_8{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 105pt; mso-char-indent-count: 10.0; mso-char-indent-size: 10.5pt}
.at_1{mso-spacerun: yes} .at_3{margin: 0cm 0cm 0pt} -->温灸器简介

温灸器是利用艾绒在燃烧中，产生艾火的穿透力和辐射作用对穴位进行温热刺激。由于艾叶中独特的药物成分，熏灼经络时，通过药物渗透，增强免疫功能，具有极高的保健能力。针、灸、药各具特色，各有局限。灸法特点在于：弥补针、药之不及。古人有：“药之不及，针之不到，灸之所宜”之说，充分说明灸疗的特殊性，及在保健方面的重要性。

使用方法：

- (1)、打开卡式开关，将艾条插入艾条孔，倒置点燃艾条。
- (2)、将温灸器放置需要治疗的部位。
- (3)、艾条燃烧到一定程度，患处感觉稍烫时，可调节艾条的高度，控制温度，避免烫伤。
- (4)、一般5-8分钟治疗完毕，打开温灸器，将燃烧剩余的艾条熄灭（最好用剪刀剪断）。
- (5)、本产品与“圣安康悦”五行罐配套使用，效果最佳。

(6)、京药管械(准)字2004第1270282号