

## 体温计、电子体温计、红外测温仪、

产品名称	体温计、电子体温计、红外测温仪、
公司名称	深圳市嵘丰科技有限公司
价格	80.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 128.00 品牌:好吉祥 型号:红外线耳温计
公司地址	广东深圳市宝安区福永街道桥南新区136栋
联系电话	86-075527460837 13652373394

## 产品详情

使用环境：

温度：16 -35

湿度： 80%rh

注意事项：

- 1.在测量之前请将耳温枪放在环境温度环境里30分钟。
- 2.请保持耳朵清洁，耳朵里有异物会引起测量不准。
- 3.当体温计屏幕上scan这个字符闪烁时才可以将体温计的探头放进耳朵。
- 4.每次测量请最少间隔10秒钟，也不要长时间的将探头放到耳朵内。
- 5.请保持探头上的玻璃体清洁，请勿划伤，否则会影响精度。
- 6.如果按开关屏幕没有显示，请更换电池再试。
- 7.如果你耳朵有疾病请不要使用入耳式体温计。
- 8.如果你需要用这个体温计测量多个人的体温请用干净的软布清洁探头，然后长按scan按键3秒中，重置系统，保证测量的准确。
- 9.如果损坏外观和探头产品将失去保修。

## 产品优势：

测量迅速：最快1-3秒内能快速测出体温

测温记忆：具有最后一次测温记忆功能

方便易读：lcd数字液晶显示，清晰易读

功能丰富：具有年、月、日时间显示等多功能

安全可靠：无玻璃水银，不用担心被其伤害

## 使用方法：

当显示屏出现scan的时候将探头放进耳朵里，马上按一下scan按键，听到滴的一声测量完成，整个过程不需要2秒钟。等到scan图标再次闪烁就可以进行第二次测量了.不要长时间将测试探头放到耳朵里!

本产品的建议零售价是¥128.00，品牌是好吉祥，型号是红外线耳温计，类型是便携式，适用对象是人体测温仪，测量范围是34 -44.2，测量精度是±0.2，分辨率是0.1，尺寸是117mmX35mmX35mm（mm），加工定制是是，规格是便携式，重量是0.12，电子体温计是耳温枪