

美丽纤腰颈椎牵引器(三层)

产品名称	美丽纤腰颈椎牵引器(三层)
公司名称	北京喜泽轩商店
价格	21.00/个
规格参数	产品类别:束腰带/束腹带 品牌:创意家居 材质:绒面面料
公司地址	中国 北京市顺义区 北京市顺义区北小营镇
联系电话	86 10 60487885 15810521206

产品详情

产品类别	束腰带/束腹带	品牌	创意家居
材质	绒面面料	规格	个
货号	A07-31-02	箱装数量	40
产地	浙江		

商品简介]

便携式颈椎牵引器体积小，重量轻（250克）牵引力大（0-80公斤），牵引行程长（1-20厘米），乳胶内胆，绒面面料，成形时符合人体生理曲度，以保护颈前敏感区不受压，调节牵引作用和固定作用时，使用者仍感舒适。此

适用范围：该产品适用于神经根型颈椎病，对长时间工作、学习、或驾车造成的颈部疼痛等症状有明显的治疗作用。使用方法：1、按正确方法戴好便携式颈椎牵引器，初用者可先照着镜子佩戴，调节颈围大小，固定同颈围的人使用（见图）。2、充气球打气前请拧紧放气螺母。3、用充气球打气直到患者感觉力度合适，症状减轻为止。4、牵引固定治疗每天至少2 - 3次，每次至少30分钟，慢放气。使用注意：1、充气前请将螺帽拧紧，特别注意使橡胶垫片压紧放气孔，勿将垫片向上倒置。充气后慢放气。2、放气时将控制伐推回，并拧松充气手球螺帽。3、长期不用时，不要把内胆中的气放净，并放气。4、颈椎病患者应注意牵引治疗后，平时伏案工作半个小时后应起身休息活动一下，睡觉时枕头要合适。注意事项：1、牵引时应循序渐进，不要过猛，在做牵引治疗出现头晕等异常反应时，应缓慢重新调整使用。2、大力牵引前应做30分钟小牵引，牵引复位时应在医生指导下进行。4、使用时避免气囊接触尖锐物体，可在充气后用软毛刷粘水清洗，不可水泡、用力揉搓或刷洗。5、勿将该产品靠近高温高热。贮存、运输方法：干燥处，运输中应注意防晒、防雨、防雪、防高温、不得与有害、有毒或有腐蚀性物质接触。