

# 体控电疗仪器 疏通理疗仪经络养生仪经络保健仪器

产品名称	体控电疗仪器 疏通理疗仪经络养生仪经络保健仪器
公司名称	广州华盛美容仪器礼品厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:华盛 产地:中国 装箱数量:6
公司地址	中国 广东 广州市白云区 新市紫荆花园35号302室
联系电话	86 020 36342811 18688397976

## 产品详情

品牌	华盛	产地	中国
装箱数量	6		

### 体控经络电疗仪使用说明

专用“体控电疗仪”（以下简称“仪器”）是根据中医经络学原理、点刺激理论，集针灸及电疗仪器功能于一体，研制的一种具有高科技含量的专用治疗经络的仪器。

#### 一、基本原理

以经络学为机理，用电能刺激经络，经络调节肌体，使人体气血畅通，肌体免疫功能增强，止痛消炎，达到防病、治病的目的。

#### 二、适应范围

凡是针灸、推拿、理疗等治疗方法的适应症都可以用本仪器进行治疗，包括：保健、美容、塑体、祛痘、头痛、面瘫、失眠、肩周炎、关节炎、滑囊炎、腰腿痛、颈椎病、胃肠炎、背痛、风湿、扭伤、结石、囊肿、痔疮、产后风、附件炎、前列腺炎、乳腺增生、手脚麻木、坐骨神经痛、中风后遗症等一些疑难杂症，对癌症患者也有意想不到的神奇般的疗效。

#### 三、特点

方法独特、使用方便、体感好、安全可靠、效果显著。

#### 四、使用方法

仪器后侧插口为输出插，右侧旋钮为电流强度档，旋钮正时针旋转电流均增大。治疗时旋钮由左（从最小开始）向右根据受术者的承受量逐渐增大。

治疗方法分自治法和双人治疗，双人治疗效果更好。

## 五、使用须知

1、严禁使用者用两手同时抓触或抓、握专用“体控经络电疗仪”的两个输出端，否则会依法触电事故发生。切忌!切忌!治疗时要用湿手绢将电极包裹，其中一极必须用脚踩。手先按，脚后踩。先抬脚，后松手。手和电极必须贴紧皮肤。脚踩、抬电极必须快速。

2、治疗时电极或施电者手指应避免心区和皮肤损处。电量宁小勿大。躯体部和四肢电流 12ma，头部 5ma。

治疗时间一般每日一次，一次20分钟，十次一个疗程，休息2-3天后继续第二个疗程。

3、使用仪器时，各项工作准备就绪后方可接通电源实施操作。治疗结束后，必须先关机，然