

# 西安呼吸机，凯迪泰-福通ST20呼吸机优势

产品名称	西安呼吸机，凯迪泰-福通ST20呼吸机优势
公司名称	西安乐源医疗提携有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:凯迪泰 型号:福通ST20 产地:美国
公司地址	陕西省西安市碑林区太乙路132号
联系电话	029-83261321 13992893680

## 产品详情

### 美国凯迪泰-福通ST20呼吸机

福通双水平呼吸机采用德国进口优质电机，动力稳定强劲;领先的动态呼吸追踪DRT专利技术，实现完美人机同步，让治疗更舒适有效，适用于各型睡眠呼吸暂停低通气综合征，各种急、慢性呼衰，尤其是CO<sub>2</sub>PD引起的呼衰

### 使用指导

#### 1. 仪器配置概述

A.主机一台(内含过滤棉一块);

B.加湿器一个;

C.电源适配器一个(含适配器用电源软电线一根);

D.转接管一个;

\* E.带压力采样管的呼吸管路一条;

\* F.面罩一个，接口外径为22mm（国际标准）；

\* G.面罩固定头带一条;

H.专用背包一个

注：以上带\*标部分为其他公司生产，属外购件（应购买有注册证的产品）

## 2. 设备检查和连接

A请检查本治疗仪是否完好无损，附件及选用件是否齐全。

B将本治疗仪和加湿器放置在牢固平坦表面上;确认主机后方的过滤盒进风口未被堵塞。

C将电源线与电源适配器连接，电源适配器直流输出端与设备后面直流电源接口连接。

D将呼吸机管路两端分别与治疗仪出气叫屈和面罩连接接口连接。

E将压力采样管与本治疗仪的压力采样管接口相连。

## 3. 加湿器的使用

A首次使用加湿器前，请用清水彻底清洗，并避免电源部位侵水。

B加湿器必须在盖好上盖后才能和治疗仪连接。

C加湿器注水、清洗或搬动时，务必首先断开与治疗仪的电源和管理连接。

D为了保护加湿器效率，并减少清洗次数，强烈建议您使用纯净水或蒸馏水。

E给加湿器注水时，务必保证水位在最大水位线内。

F加水后的加湿器需确认正确连接并戴好面罩后，方可启动治疗仪。

G治疗仪器启动开机后，加湿器将自动启动加热功能，至水温达到设定值，该设定值可通过位于加湿器下方的旋钮调整。

#### 4. 启动/关闭治疗仪

将呼吸管路连接好，带好头带、面罩。按开关键启动治疗仪。根据需要调整面罩的位置及头带的松紧，使漏气减至最小。停用时，按开关键关机。

##### 注意事项

1. 治疗仪应放置在平稳牢固的桌面或平台上使用，防止振动。

2. 插拔呼吸机管路和加湿器时应用力均匀。

3. 使用前检查治疗仪是否正常。

4. 使用后切记切断治疗仪电源。

##### 清洁与保养

## 1.主机的清洁

**警告：** 为了避免电击，清洁前务必断开治疗仪电源。

**注意：** 不要将设备浸入液体或让液体流入机内。

断开治疗仪的电源，用清水或者中性洗涤液浸湿布，擦拭前面板和外壳的表面。

在接通电源前，治疗仪必须完全晾干。

面罩和呼吸管路应经常清洁。面罩和附件的具体清洁方法，请参考相关的使用手册。

脏的过滤绵会增加治疗仪工作阻力并使运行温度升高，影响治疗仪性能及寿命。需要定期检查并及时更换进气口过滤绵。

## 2. 加湿器的清洁

A关闭治疗仪，断开电源，从主机上加湿器电源插座中拔出加湿器的电源线。

B拆下呼吸管路和加湿器，打开加湿器上盖。

C将加湿器内水倒出，可使用清洁剂或洗涤剂对加湿器的内部清洗。请使用带清洁剂或洗涤剂的软布对加湿器外壳进行擦拭、清洁，切勿用水直接冲洗加湿器的外壳底部。

D严禁将加湿器泡在水中清洗。

## 3.过滤绵的清洁

A过滤绵放在治疗仪后面板的过滤盒里，可直接取出。过滤绵只能更换，建议用户自行每1-2周更换一次。过滤绵不可以清洗。

B开机之前，必须安装好干燥的过滤绵。

4.注意：

A请不要将潮湿的过滤海绵装到本治疗仪中，否则会损坏治疗仪。

B不及时更换过滤绵可能会影响您的健康并严重缩短治疗仪的寿命

C如使用环境中的灰尘、烟雾较大，更换时间应视具体情况而缩短

更多产品，请咨询：

咨询热线：029-83261321

服务网址：<http://www.hkx999.com>