

# 周林频谱仪WS-311 神灯 理疗灯 颈椎腰椎

产品名称	周林频谱仪WS-311 神灯 理疗灯 颈椎腰椎
公司名称	包头市乐康医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:周林频谱仪 型号:WS-311
公司地址	内蒙古自治区包头市昆区乌兰道32号九州天骄商住楼-101
联系电话	15334729106 15848606056

## 产品详情

品牌 周林频谱仪 型号 WS-311

### 品牌介绍

北京周林频谱科技有限公司是北京中关村科技园区的高新技术企业，长期致力于生物频谱技术的科研推广和成果转化工作。经过多年的探索，生物频谱技术的应用领域从初期的人体频谱延伸到包括植物、动物、微生物在内的生物频谱领域，获得了中、美、日、澳及欧洲专利。周林频谱仪九获国际大奖，通过了iso9001、iso13485质量体系认证和欧盟ce认证。多年的市场推广进入了上百万家庭和多家医疗单位。

周林频谱保健治疗仪是电磁波辐射理疗仪器，具有宽频谱特性，涉及可见光、红外线全频段（主能量区），并延伸至微波范围（微弱）。仪器以直接照射方式作用于人体、产生有益的生理、生化反应，达到治疗保健效果。

### 适用范围

对支气管炎、骨关节痛、伤口愈合不良，慢性盆腔炎、慢性胃炎、带状疱疹、冻疮等有治疗或辅助治疗效果。有促进血液循环、消炎镇痛、改善神经系统功能等作用。

### 产品参数

频谱范围：具有宽频谱特性，包括近、中、远红外，并延伸至毫米波段（微弱）

供电电压：220v~~，110v~~，50hz~~60hz

辐射器件使用寿命：>6000小时

环境条件：环境温度-10~~+40 相对湿度 85%

功率：65~~250w

## 操作方法

- 1、插上电源插头，接通电源。
- 2、选择工作状态："0"位表示开关在电源切断位置。"一"位表示工作状态在"弱档位置，指示灯显示绿色"。"二"位表示工作状态在"强档位置，指示灯显示黄色"。
- 3、仪器不允许垂直使用。治疗头有限位装置，不允许360度旋转。
- 4、用完将电源开关置于"0"位，拔下电源插头，断掉电源。

## 使用指南

- 1、依据使用要求，参照本手册中《使用参考表及穴区图》进行照射，穴区可依序选择。
- 2、使用时照射头应直接面对患部，该部位应完全裸露，但要避免风吹受凉；对非照射部位注意保暖，照射后立即穿好衣服。
- 3、照射距离一般为10~~20厘米，以患部感觉温和、舒适为宜（皮肤表面处可为38~~46 ）。)
- 4、通常一日照射一次（也可多次），每次照射时间一般不少于30分钟，深部病灶可适当延长时间。通常七天为一疗程，一般慢性病应连续治疗3~~5个疗程，疗程之间可不安排间隔。
- 5、显效时间通常依适应症和病况而异，治疗效果与能否在疗程内保持连续照射，并保证每次照射时间有关。经常照射保健穴区能产生良好的健身效果。
- 6、个别患者照射时有蚁走、热麻、催眠感或病况短期内略有加剧等现象，继续使用将会逐渐减缓、消失。此类虽属正常反应，但使用时仍需注意观察，以免产生不良影响。
- 7、照射涉及眼部时，请闭眼并用弱档，每次治疗时间不超过20分钟。
- 8、冻疮等体表溃疡者，以及婴幼儿照射时，以选择弱档为宜。
- 9、本仪器与药物（尤其是涂敷药物）同时使用时，通常能增强药物吸收效果。
- 10、老人、婴幼儿及残疾人使用时，需有人在旁护理。
- 11、对使用参考表中尚未列入适用范围的病症，患者可在医生指导下进行治疗。

禁忌：本仪器不宜对危重病人使用

## 售后服务

本产品全国联保，享受三包服务，质保期为：产品保修1年

## 注意事项

1. 本产品按适用电压分为220v和110v两种类型，使用前请检查与本地供电电压是否一致。
2. 仪器安装存放和拆卸时，不得将电源插头插在供电插座上。
3. 辐射器件工作时温度较高，调整仪器照射位置时请当心，防止烫伤。4. 仪器工作时严禁手指或其它异物插入辐射器件的保护网内，以防烫伤或电击。
5. 在潮湿环境（湿度>85%）或长期放置后再启用时，应先用弱档预热3分钟，断电等待3~4分钟。重复2遍后方可工作使用。
7. 仪器允许连续工作，使用深部病灶可适当延长时间。通常七天为一疗程，一般慢性病应连续治疗3~5个疗程，疗程之间可不安排间隔。
5. 显效时间通常依适应症和病况而异，治疗效果与能否在疗程内保持连续照射，并保证每次照射时间有关。经常照射保健穴区能产生良好的健身效果。
6. 个别患者照射时有蚁走、热麻、催眠感或病况短期内略有加剧等现象，继续使用将会逐渐减缓、消失。此类虽属正常反应，但使用时仍需注意观察，以免产生不良影响。
7. 照射涉及眼部时，请闭眼并用弱档，每次治疗时间不超过20分钟。
8. 冻疮等体表溃疡者，以及婴幼儿照射时，以选择弱档为宜。
9. 本仪器与药物（尤其是涂敷药物）同时使用时，通常能增强药物吸收效果。
10. 老人、婴幼儿及残疾人使用时，需有人在旁护理。
11. 对使用参考表中尚未列入适用范围

订购电话：15848606056