

欧姆龙7051智能电子血压计 HEM-7051

产品名称	欧姆龙7051智能电子血压计 HEM-7051
公司名称	包头市乐康医疗器械有限公司
价格	328.00/件
规格参数	品牌:欧姆龙 型号:7051
公司地址	内蒙古自治区包头市昆区乌兰道32号九州天骄商住楼-101
联系电话	15334729106 15848606056

产品详情

品牌	欧姆龙	型号	7051
规格	121 × 86 × 141 (mm)	净重	340克
产地	大连	电源形式	交直流
额定电压	6 (V)	显示方式	LCD液晶显示
测量范围	0-299 (mmHg)	测量方法	示波法
压力准确度 ±	4 (mmHg)	脉搏准确度 ±	5 (%)
适用工作温度	-20到+40 ()	排气方式	自动
自动关闭功能	有	箱装数量	12 (台)
产品类别	家用血压计		

商品名称：欧姆龙hem-7051生产厂家：欧姆龙商品产地：中国大连型号：hem-7051电池种类：5号电池外接电源：无适合年龄：除儿童以外的所有人群保修期：一年使用说明：希望能够早、中、晚1日测量3次，早上起床、心情舒畅时，大小便数分钟后，没有尿意时。测量前做几次深呼吸，心情放松，避免重复测量，坐在椅子上，背挺直，臂带要绑紧，臂带与心脏处于同一高度。注意事项：避免运动前后，饭后1小时内，饮酒、咖啡、红茶前后，入浴前后及吸烟前后进行测量。保修期12个月，pvc材质。纸盒装包装，内有血压计、保修卡、说明书、电池、臂带。包装长12.1cm，宽8.6cm，高14.1cm。特殊说明：稳压器就是变压器，它可以直接与家里的插座连接，这样的话就可以避免电池没电的情况发生了，另外它与200多元的区别就是，他是全自动的，操作起来比较方便，200多的是半自动的，操作起来不是很方便。【产品参数】·测量范围：压力（0-299mmhg）脉搏数（40跳/分-180跳/分）·测量精度：压力（±4mmhg以内）脉搏数（读数的±5%以内）·外型尺寸：宽121*高86*厚141mm·电源寿命：5号干电池4节，约300次·随机附件：臂带、电池、顾客服务一览表、说明书（附保修卡：出现非人为因素的质量问题一个月内包退包换；免费保修一年，终身维护）、合格证外形尺寸：宽121mm × 高86mm × 厚141mm

高血压易引发血管病，而你的家人也许没在意过自己的血压状况。在这个高血压的高发季节，请为您的家人备一部欧姆龙电子血压计吧，它特有智能传感技术，通过美国医疗器械促进协会（aami）和英国高血压学会（bhs）认证，精确、便捷量血压，帮您随时关注家人的健康安危，更将您的关心带到他的身边。·智能测压·21次记忆功能·加大型屏幕，增大140%·改良扇形臂带·视频斜坡设计·可同

时显示血压值和脉搏数 • 单键式开/关 • 静音设计 • 设有ac稳压电源接口，可直接使用交流电源

什么是智能型测量？· 在自动加压的基础上发展了模糊技术控制加压，机器可以根据患者的血压高低智能化地决定加压到达值· 定速加压时先测出下压，再测出上压，直接排气显示结果，最大限度地缩短了测量时间，使测量精确度更高· 是目前技术水平能制造的先进机种，同时弥补了自动式血压计固定加压一般到170mmhg，若患者上压高于此数值，测量可能失败的缺陷

为什么在家测得的值比在医院测得的低？1．在家测量情绪稳定、环境适宜，一般会比在医院测得的值低20-30mmhg，所以了解自己在家里平静时的血压平常值是很重要的。2．测量时臂带位置高于心脏水平高度，测出的血压值偏低。

为什么在家测得的值比在医院测得的高？1．服用降压药的人，失去药效时会引起血压值偏高。2．臂带缠绕位置不正确，导致血压计捕捉不到动脉信号，测出的血压值偏高。3．臂带缠绕过松，会使压迫力传递不到动脉，导致血压值偏高。4．测量时姿势不正确，弯腰、盘腿坐等易产生腹压的姿势及臂带位置低于心脏水平高度。

为什么每次测得的血压值都不一样？1．请在同一时间段、同样环境、同样心情状态下测量2．血压会因各种原因产生波动：吸烟、运动、测量时谈话、沐浴、饮酒、紧张、温度变化等3．反复持续测量，会使手臂受压迫而导致血液流通不畅，引起血压值变化

注意：血压值24小时在变动,因为血压每时每刻都会因气候、情绪、睡眠时间、身体的运动、饮食等内、外因素而变化。只测1次血压是无法正确判断自己血压健康状态的。要早中晚1天中测3次血压，还要按时记录自己测量时的心情及身体状态等信息。因为左右手的血压差值可能约有10mmhg，所以每天请在同一时间，用同一只手腕，相同姿势进行血压测量。