

# 一次性使用导尿包,导尿包,威海华诚医疗查看

产品名称	一次性使用导尿包,导尿包,威海华诚医疗查看
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:YO1413
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

## 产品详情

### 【注意点】

- 1.严格执行无菌操作，导尿管误插入阴道或脱出时，应更换无菌导尿管重插。
- 2.选择光滑和粗细适宜的导尿管。插入及拔出导尿管动作务必轻柔，切忌粗暴，以免损伤尿道粘膜。
- 3.若膀胱高度膨胀，患者又极度虚弱时，第一次导尿不应超过500ml，以免导致虚脱或血尿。

### 操作方法

女性导尿法女性尿道短，约3 - 5cm长，富于扩张性，尿道口在阴蒂下方，呈矢状裂。老年妇女由于会阴肌肉松弛，尿道口回缩，插导尿管时应正确辨认。

男性导尿术成人男性尿道全长约17 - 20cm，有两个弯曲即活动的耻骨前弯和固定的耻骨下弯；三个狭窄部即尿道内口、膜部和尿道外口，导尿时，须掌握这些解剖特点，以便导尿管顺利插入。

### 操作方法

女性导尿法女性尿道短，约3 - 5cm长，富于扩张性，尿道口在阴蒂下方，呈矢状裂。老年妇女由于会阴肌肉松弛，尿道口回缩，插导尿管时应正确辨认。

男性导尿术成人男性尿道全长约17 - 20cm，有两个弯曲即活动的耻骨前弯和固定的耻骨下弯；三个狭窄部即尿道内口、膜部和尿道外口，导尿时，须掌握这些解剖特点，以便导尿管顺利插入。