

英国施乐辉仙卡疤痕敌自粘性硅胶片12 × 2.5cm

产品名称	英国施乐辉仙卡疤痕敌自粘性硅胶片12 × 2.5cm
公司名称	杭州德康贸易有限公司
价格	135.00/件
规格参数	
公司地址	杭州市下城区戒坛寺巷25, 26号5幢(万华武林商务大厦A楼) 328室
联系电话	88843605

产品详情

通用名：《疤痕敌》

商品名：《仙卡》 规格：12cm x 2.5cm

英国原装进口上海施乐辉公司分装！

尺寸有:

12cm x 2.5cm市场价：216元，本店折扣价135元,有货

12cm x 6cm市场价：488元，本店折扣价248元,有货12cm x 15cm市场价：568元，本店折扣价350元,有货

剖腹产的妈妈们还在为您的疤痕忧心吗？

漂亮的mm们还在为难看的疤痕不能穿露脐装和吊带装而烦恼吗？

仙卡疤痕敌能抚平您的疤痕和烦恼,为您带来永久的快乐。

经医学证实能有效治疗带红级凹凸起的新旧疤痕！90%病人经试用后疤痕外观有明显改善,包括疤痕软化,变平及令红色逐渐消退.

疤痕敌柔软舒适,容易使用,可剪裁成适当的尺码配合不同疤痕的需要,并具低敏感性,儿童亦可安全使用.

用法: 疤痕敌可重复使用,但必须每日清洗,兼且持久耐用.每片可使用长达一个月,连续使用两至四个月可获最佳效果.

内附中文说明. 配合"康瑞保除疤软膏"能发挥最佳功效.

英国制造原装正品!

商品特点:

“仙卡疤痕敌”是一种先进的柔软透明的硅胶片，耐用且自粘力强。经临床实验证明，“仙卡疤痕敌”能有效软化、修平及淡化因烧伤、烫伤及手术，或其它创伤造成的增生性及瘢痕疤痕。这些增生性及瘢痕性疤痕会导致患者不适，行动障碍。

“仙卡疤痕敌”不需要动手术，无痕，简单及无毒，对成人及儿童同样安全有效。

商品信息：

cica-care 仙卡疤痕敌柔软舒服,持久耐用,每片可以用14-28天;经医学报告证明,能对增生性及瘢痕性,带红的凸起疤痕发挥有效的医治及预防作用.

cica-care 仙卡疤痕敌可剪裁成合适尺码,以配合不同疤痕的需要.

剖宫产的妈妈们的疤痕恢复起特效作用.非常神奇.疤痕敌还您自信与靓丽
女性在剖腹产手术后常会留下很明显的疤痕,不仅非常难看,更会在心灵上留下难言之隐。

适应症：

- 1.治疗带红及凸起疤痕(增生性及瘢痕性)
- 2.预防愈合后之伤口增生疤痕.
- 3.治疗及预防烧伤、创伤、手术后引起的增生性瘢痕以及瘢痕疙瘩。

疗效：可使瘢痕逐渐软化、变平；可减轻瘙痒、疼痛症状；沉淀的色素会变浅。对增生性瘢痕效果尤为明显。

禁忌症：皮肤破损处，开放性创面。不能使用。

外科伤口拆线后方可使用。并发症和副作用：1.皮肤表皮浸渍

2.皮疹

优点：仙卡疤痕敌（cica-care）是一种透明、柔软的硅胶片，能令疤痕保持一定程度的湿度、温度、压力、氧气量，可以软化疤痕，改善及预防因烧伤、烫伤、手术开刀或其他伤口引起的增生性及瘢痕性疤痕；备受世界各地医护工作者推崇。·安全无痛 使用疤痕敌，无需做手术、服用药物或涂药膏，每片独立包装，安全卫生。·自粘贴服疤痕敌柔软舒适，粘性特强，在一般情况下，无需再用胶布来固定，粘得贴服。·易洗再用疤痕敌可重复使用，用不含油性的清洁剂及温水清洗，自然干燥后可再贴；直到变成不易清洁或沾贴时，便要更换。每片疤痕敌可重复使用一个月。·透明可剪 透明美观，可剪成适合尺寸，方便使用。·经济方便 可重复使用及裁剪，用法简单，非常经济方便。·疗效显著疤痕敌备有医学证明报告疗效显著。

使用方法：1、开启 撕开包装纸，取出疤痕敌硅胶片。2、裁剪
将疤痕敌剪成能完全遮盖疤痕的合适尺寸。3、贴上 将疤痕敌贴上患处。4、清洗 每天拿下来，用不含油性的清洁剂及温水清洗，自然干燥后再用，在温暖潮湿天气或多汗排出的日期，宜多清洗，以保持其疗效。

注意事项1、绝不可贴在未完全愈合的伤口上。2、为了逐渐增强皮肤的适应性，请依下列指示时间进行粘贴第1天4小时第2天4小时第3天8小时第4天8小时第5天10小时第6天12小时第7天14小时第8天16小时第9天18小时第10天20小时第11天22小时第12天或以后 24小时3、切勿使用刺激皮肤的清洁剂，以免引起过敏。4、若贴在关节或较难贴的位置上，可以用薄绷带或医生胶布来固定。5、把剪后剩余的疤痕敌放回原胶盒，封妥并存放于干爽阴凉处。6、切勿任何药膏或物品涂在疤痕处，否则会影响疤痕敌的疗效。7、若贴于不洁的皮肤上或贴得太紧，可能会引起红疹，此时应减少粘少沾贴时间（由24小时减至12小时，然后让疤痕休12小时，再贴上）。如红疹持续不退，应停止使用，并咨询医生。8、当疤痕敌变得难于清洗或粘贴时（大约25至30天），便需更换另一片新的疤痕敌。

规格：12cm × 2.5cm、12cm × 6cm和12cm × 15cm 三种

疗效显著 自粘性 柔软服贴 反复使用 经济实惠 使用简便
cica-care “仙卡”是一种柔软、自粘

并有透气性的硅胶片。用来治疗或预防烧

伤、创伤、手术后引起的增生性疤痕和瘢

痕疙瘩有显著疗效。由于“仙卡”有自

粘性和反复使用的优点，对疤痕的治疗及

预防经济实惠。特点自粘自粘的“仙卡”为一项专利技术，粘层

贴在疤痕上，上面一层是不粘的硅胶网层；

因此不需要第二层敷料固定，使用起来更清

洁和方便。耐用 硅胶膜和凝胶结合为一个牢固的支持面，

安全重复使用不碎裂。透气 可使伤口及周围的皮肤呼吸，减少皮肤

浸渍。医用脱敏粘胶，防止过敏现象的发

生。柔软服贴 “仙卡”由柔软服贴的硅胶和自粘性

胶组成，可以使用在身体任何部位，包括耳

垂和胸骨部位

仙卡疤痕敌如何发挥功效？

研究表明仙卡疤痕敌能够滋润疤痕范围，使其变软而使得改善。经医学科学证明

，90%的个案有显著效果，它使紅色且凸起的疤痕变软、扁平及淡化色素。

如何使用仙卡疤痕敌？

刚开始使用仙卡疤痕敌的首两天，每天应该只使用仙卡疤痕敌4小时。接下去的两天，每天可延长至8小时。当皮肤适宜后，每日可增加2小时，必须每日使用最小12小时，方能达至最佳效果。可能的话，每天应该贴上24小时。此按部就班的方法是让皮肤能逐渐适宜仙卡疤痕敌。当仙卡疤痕敌开始变旧或出现清洗困难，变薄时，此时应该更换。这种情况经常在连续使用一个月后出现。如果仙卡疤痕敌，是位位于关节部位或经常受到磨擦的情况下，其使用期限将会缩短。每片仙卡疤痕敌可重复使用达一个月之久。您必须连续使用疤痕敌直至完成整个过程，以达到最佳效果。仙卡疤痕敌比较厚，自粘的粘性不是特别强，可使用以下敷料以作辅助。

疗程需要多久？

这要看个人的疤痕而定。某些人只需数天便可见效。一般而言，若正确使用仙卡疤痕敌，平均2至4个月的疗程便会见效。

仙卡疤痕敌是否适合全家人使用？

仙卡疤痕敌是得医学证明的自粘性硅胶片，适合小朋友及成人使用。如遇到皮肤表皮浸渍，皮疹立即停用，恢复好在继续使用！

受伤后多久才能使用仙卡疤痕敌？

仙卡疤痕敌适宜新旧疤痕：包括外科 / 美容手术，分晚开刀或意外受伤（刮伤或烧伤）所导致的疤痕。在使用仙卡疤痕敌时，确保伤口完全愈合在使用。切勿使用时未愈合、感染、结痂或未拆除缝针的伤口处。

陈旧疤痕是否见效？

仙卡疤痕敌被证实对于长达20年的疤痕亦能见效。不过需要时间，得坚持用仙卡疤痕敌3个疗程以上会有明显的效果！当然，如果疤痕形成的时间愈短，改善疤痕的功效更快见效。

用了仙卡疤痕敌后而淡化的疤痕会重现吗？

经临床实验证明，类似情况级少发生。