

# 导尿包\_威海华诚医疗\_手术用无菌导尿包

产品名称	导尿包_威海华诚医疗_手术用无菌导尿包
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:QM1283
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

## 产品详情

插管过程中有尿道损伤现象的应及时报告医生使用抗生素，防止尿路感染，拔管前从尿道口注入少量石蜡油，并轻轻转动，以防止粘膜、血痂与尿管粘连，导致拔管前加重尿道粘膜损伤，出现血尿。

对于年老体弱，长期卧床的患者，特别是女性，由于会阴部肌肉弹性较差，尿道括约肌较松弛，导尿时选择型号较大，官腔较粗的导尿管，这样既可以防止漏尿，又能保证尿管通畅，不宜堵塞。

### 【使用说明】

1. 使用本产品前应首先检查生产批号、失效年月、包装是否完好。
2. 使用时打开包装，戴上手套，检查器械是否齐全；进行外阴消毒后，将导尿管与引流袋连接,关闭引流袋上止液夹,备用；将导尿管慢慢插入尿道（切忌反复抽动导尿管，以免损伤尿道粘膜），见有尿液流出时再插入2cm然后固定；导尿管留置期间应经常检查其固定情况。
3. 用后进行常规处理。

### 过程控制参数评价

- a) 温度过低会造成达不到材料熔点，无粘合造成包装漏气。如温度过高则会造成包装材料收缩、糊焦，影响美观，甚至材料熔化、破损。
- b) 封口速度过快（停留时间过短）会造成材料吸热过少，密封强度达不到。如速度过慢（停留时间过长）则会出现包装材料收缩、皱折、糊焦等现象。
- c) 过程验证应在过程极限下进行。