

美容仪器MY-H500 多功能活肤仪 注氧水氧喷氧水雕 美肤仪（5）

产品名称	美容仪器MY-H500 多功能活肤仪 注氧水氧喷氧水雕 美肤仪（5）
公司名称	河南星维庆医疗器械有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	建议零售价:8000.00 品牌:玛亚 型号:MY-H500
公司地址	郑州市中原区伊河路136号光合大厦19楼1913
联系电话	17266030525

产品详情

出口品牌my-h500立式注氧水氧喷氧水雕仪 美容专用仪

品牌：广州欣然

界面：8寸触摸屏 规格：110*63*43cm 产地：中国广东广州

皮肤缺氧

造成皮肤自我更新能力差，手感粗糙、脸部毛孔加粗、长出细纹、色斑、黑眼圈、脸色暗淡发黄等。缺氧使许多女孩子年纪轻轻，皮肤就干燥、缺乏光泽，甚至失去弹性。皮肤需要什么？|水份|营养物|氧气

氧气---生命之源氧气带给人们清新明亮的每一。没有氧就没有新陈代谢,皮肤及身体内的细胞就没有能量。氧气是一切生命的基本元素，更是青春与活力的源泉。

我们的皮肤缺氧吗？年轻、健康的皮肤能够很快得到氧气补充，但是随着年龄增长及环境的影响，微血管老化不能再提供充足的氧,使得细胞分裂速度明显放慢,胶原及弹力纤维减少，皮肤就会变得单薄、干燥、出现皱纹和色斑。

为什么需要氧气？表皮是皮肤的一个活跃的部分,尤其是处于表皮底层的基底层,这里是细胞发生分裂的区域,皮肤中的黑色素也是由这里的黑色素细胞产生。表皮深处的这些组织要正常工作需要大量的能量,而氧

气能将各种养份转化成能量。

皮肤缺氧会有什么影响？细胞活跃能力减慢何处寻找生命的源泉……皮肤缺乏氧气是导致衰老的主要原因之一，怎样为肌肤注入新的活力

水雕仪采用世界先进的psa(变压吸附原理)，在常温下,接通电源,瞬时即可连续从空气中分离出高浓度且无尘无菌的医用纯氧,同时实现了吸氧、注氧和雾化喷氧三大功能为一体,全面而彻底地解决了身体、皮肤缺氧的难题。氧气注射疗程，主要是透过注氧工具，施以适当及限定压力，利用纯氧将活性成分产品注入皮肤底层，再透过脉搏式推动，输送纯氧到更深入的皮肤深层。

氧气治疗发展一日千里，近十年已普遍被人认同是一项用途广泛的美容医疗技术。无论在医学或美容发展史上，氧气治疗的贡献良多，并深受各界青睐。在医学研究领域上，这类治疗技术已超越微创的局限，达到无针无痛的境界。过往，无针无痛技术将注射疫苗和胰岛素注入身体，被人体血管吸收。然而，血管吸收活性元素并不是美容用途所需要的一个护理程序或目的。

肌肤水雕仪提供无针无痛的美容医学治疗，它能利用氧气将特定量的活性元素，包括玻尿酸、氧气血清等，推入皮肤更深一层。这些活性元素能渗入皮肤深层，直达表皮细胞的自然空隙，同时产生正面的影响力。

本仪器能将98%的纯氧及活性营养精华,以2bar的压力注入皮肤底层内，为整体肌体细胞补充所需氧份，增加细胞弹性和活性，更让你的肌肤恢复健康,嫩白光泽的年轻状态,焕发青春光彩.四重功效完美结合，有效激活细胞、增强代谢，深层呵护，从而达到完美的治疗效果,对各类皮肤的深层清洁、受损肌肤的修复,新生细胞的再生,色素色斑的消退,红血丝的改善护理均有良好的效果，使你的肌肤不用任何的修饰,变的自然,光亮,紧致细腻,有光泽,真正使时光倒流,还原青春姿色。

仪器的优势特点：

活性营养物质能迅速渗透到皮肤基底层，促进皮肤吸收养份；活性营养物质连角质层都无法渗透，更不可能进入基底层。1. 去角质与提供水分同时进行:超微小气泡对角质和毛囊异物的精剥离作用，可高效而准确祛除堆积和老化角质细胞，彻底清洁毛囊漏斗部（毛囊孔）而健康角质及毛囊漏斗部几乎不受任何影响，在清洁的同时带来大量水分，提供持续的皮肤保湿功效。

2. 安全、几乎没有任何皮肤伤害：针对老化堆积的角质细胞产生剥离作用，对正常的皮肤几乎无伤害，

更精细，更有靶向性，更柔和，同时清洁更突出。

3. 营养供应：独有的操作首具，可根据客户的实际情况分别导入祛斑，祛红，祛痘，祛皱等各种治疗因子，皮肤的吸收量明显提高。

4. 特制吸头：配有多重特制吸头，分别用于鼻部，头皮，面部等部位，几乎所有的吸头都是由两个吸入口和一个乳液射出口组成的特殊设计的螺旋形吸头，可使小气泡与皮肤长时接触，从而精及高效的清除堆积的老化角质细胞，清除毛囊的同时给皮肤注入所需营养。

治疗范围：

1) 保湿及美白、消除皱纹，平滑肌肤、回复弹性及青春。

2) 增加抗氧化能力，减淡色斑、年龄斑等面部斑点。3) 为肌肤提供充足的氧气，调理皮脂分泌，减轻面部粉刺，净化暗疮。4) 平衡干、油性肌肤、增加细胞活性，改善肌肤灰暗状况，让肌肤红润、通透。5) 增加肌肤胶原细胞活性，抚平细纹，缩小毛孔，使肌肤细致紧实。6) 加速新陈代谢，消除面部瑕疵、均匀肤色、改善暗哑肤色、使肌肤变得白皙。7) 修复受损肌肤，减少因过度磨皮、激光治疗及其他刺激性疗程后的泛红现象，重组健康细胞。8) 提高肌肤对精华营养素的吸收功能。

一：水氧嫩肤仪系统工作原理：

利用强压氧，将灭菌盐水（生理盐水）和氧同时通入空压设备，将颗粒型的水珠转化为极小的分子量作用皮肤（5-200 μ m微米），微小的水滴会以喷雾（jet spray）形式，用200m/sec（秒）的速度（超音速）由特殊设计而成的喷嘴喷出，极速将水和氧注入人体皮肤底层。

二、祛除亚黄、灰暗、皱纹、嫩肤的治疗原理：

利用强压氧气和水以微小的水滴以喷雾流形式作用于皮肤，可以穿透皮肤毛孔及皮肤裂纹，由表皮层直至渗透到真皮层从而促进细胞的再生，快速、直接为肌肤提供充足营养，同时清除较深的表皮层垃圾，高压氧和营养液可刺激真层的纤维组织再生，促使细胞的新陈代谢。从而达到有效祛除皮肤亚黄、灰暗、黄褐斑、嫩肤、除皱的效果。

三、祛除痤疮的治疗原理：

利用强压氧气和水以微小的水滴以喷雾流作用于皮肤，厌氧型的痤疮丙酸杆菌接触氧气，导致死亡，可祛除生成的痤疮；强压氧气和水可清除较深的表皮层垃圾，改善皮脂腺的油脂分泌量，实现了彻底祛除痤疮，不反弹的效果。

四、祛除疤痕的治疗原理：

利用强压氧气和水溶营养液直接作用于疤痕部位，激活表皮坏死的细胞组织，促进胶原纤维和弹力纤维再生，补充修复过程中所需营养；从而，达到修复疤痕的作用

手柄操作（1）吸引排毒。（用吸手柄来做）a、从颈部开始做，由上至下排毒。b、由颈部开始由下至上提升。c、沿面部的七条线拉到耳后，排至锁骨淋巴。d、沿法令纹向两边拉，抚平法令纹，收细毛孔。e、上至人中，下到承浆向下排毒。f、顺眼眶骨向上向外做提升去皱。g、额头部位向上提升。注：

1、面部有暗疮及严重红血丝的皮肤操作时要避开，做整个面部吸引排毒的时间为10分钟。2、操作时用阴力牵引，利用仪器本身的力度来做，而不能用重力下压，如果皮肤较敏感可适当调小吸引的力度，如果出痧可以用喷雾笔来舒缓。

（2）高压注氧。（用注氧手柄来做）针对不同的皮肤来选择合适的精华素。干性皮肤可达到滋润美白的效果，油性皮肤可达到收细毛孔，控油清爽的效果。混合性皮肤可平衡油脂分泌，改善肤质。注：

1、整个面部的注氧时间为20分钟，从额头向下做至下额。注氧枪有三个配件喷嘴，操作时可根据所做部位的大小来挑选。一般情况，3号喷嘴做面部，2号喷嘴做眼部，1号喷嘴做鼻翼两侧。2、将适当的精华素均匀涂于面部，根据所做的部位选择适当的喷嘴注氧。3、注氧时将注氧喷嘴平行置于皮肤上，随着仪器本身的节奏来移动。

（3）温和喷氧。（用喷枪来做）将喷嘴里放入适量的水状护肤品（水状护肤品可根据顾客皮肤的不同来选择），向后按喷雾，向下按喷氧。

操作时注意事项：1）室内保证通风。2）保证皮肤在清洁好的状态下操作。3）面部有暗疮及严重红血丝、破损皮肤操作时要避开。4）将仪器放在远离火种的地方。5）注氧时，气流的出口不要对着客人的眼睛。6）喷雾时要客人闭上眼睛。

仪器的保养及清洁：1）吸笔在每次做客人前后用酒精消毒。2）喷雾枪在做完护理后一定要装上清水，打开将里面的水状护肤品喷完，清洗干净。3）注氧枪的喷嘴为消耗品，会随着做的次数及承受的压力而有不同程度的损耗。4）吸氧罩每次使用后用酒精消毒。

使用产品：

注氧——以精华素为主（y50精华液、抗敏修复精华液、左旋vc精华液、眼部精华、面部精华、颈精华），注入皮肤真层。

喷氧——以水剂为主，各类喷雾水及玫瑰纯露、清爽平衡止痘露。

配件：

名称	数量
塑料水氧手柄	1套（手柄1只 磨头12个）
钻石水氧手柄	1只
注氧手柄	1只
钻石磨皮手柄	1盒（手柄1只 磨头9个 锦1包）
喷氧枪手柄	1只
干净瓶子	2个
回收瓶子	1个
脚踏板 电源线	各1条

注氧手柄：

通过无针头压力注氧，把纯氧及特殊的美容配方产品注入表皮基底层，强化细胞，增加其抵抗力，使废物容易排出，促进新陈代谢，治疗及改善因缺氧而引起的肤色暗淡、皱纹、松弛、色素沉着等皮肤问题。

喷氧（喷枪手柄）

使用产品：以水剂为主，各类喷雾水及玫瑰纯露、清爽平衡止痘露。使用方法：将喷嘴里放入适量的水状护肤品（水状护肤品可根据顾客皮肤的不同来选择），向后按喷雾，向下按喷氧。

注意事项：

（1）作面部喷氧疗程使用时，气压应调至5lpm。（2）喷氧枪所使用的产品必须是水状性的产品。（3）喷氧护理时小心避免喷入口中及鼻孔中。（4）每次使用喷氧枪前、后都应清洗小杯及枪内管孔。避免因产品凝干而造成管孔堵塞。清洗方法：将纯净水倒入小杯内，然后将控制钮往下按再向后拉，快速将杯内的水喷出即可。

钻石微雕手柄：

钻石微雕焕肤疗法，是利用镶嵌有钻石颗粒的微雕管，配合摩擦和真空抽吸技术，彻底去除表皮外层老化细胞，促进皮肤细胞更新的技术。这是一种浅层物理性疗法，它弥补了化学去角质的缺点，利用真空

吸引方式将皮肤吸附于不同粗细的钻石微雕钻头上，配合适宜的吸力与钻头的移动速度，完灵活掌控治疗过程。是一种非侵入性疗法，不具任何刺激性，安全、简单、快速、无副作用。钻石微雕术除了具有快速消除细小皱纹、改善粗大毛孔等皮肤美容价值外，对一些皮肤疾病也有一定疗效，如治疗青春痘、粉刺、痘疤、一般疤痕或妊娠纹等。

水雕磨皮手柄:

将氧气或洁净的压缩空气和营养液充分结合，从手柄吸附液体（原液、精华液或生理盐水等）作用于皮肤，将营养液利用压力吸附方式吸入表皮直至渗透到真层，深层清洁皮肤，有效清除皮肤过敏原和皮脂螨、毛囊螨，治疗青春痘、痤疮有良好的效果。在基础液中加入营养物质在清洁皮肤的同时为皮肤补充营养，可有效改善皮肤内环境，改善皮肤的新陈代谢。

钻石水雕手柄：通过刺激皮肤生长层吸收氧气和促进血液循环，加速皮肤组织发育，促进胶原蛋白及弹性蛋白的生长，调理肤质及重健康肌肤；改善堆积老化角质、粗糙及老化肌肤；改善肌肤细纹及松弛的现象；淡化表皮层浅斑；改善毛孔粗大、痘疤及凹洞；刺血液循环及新陈代谢。结合适当的护肤程序。使用于各种皮肤，敏感肌肤亦可使用。脸部功效：色素沉着症、角质肥厚症、任何疤痕、暗疮；油性、毛孔粗大；老化、新陈代谢差；身体功效：妊娠纹；全身角质老化；肥胖症

后销服务：

工厂直销，保修一年，如在一年内有任质量问题由工厂提供免费维修服务，此外工厂将会提供仪器终身维护。

欢迎各经销商，批发商，oem，odm及各地美容院前来订购。

我们的合作快递公司是顺丰，申通，圆通等。

本产品的建议零售价是8000.00，品牌是玛亚，型号是MY-H500，规格是110*63*43cm，功能是美白补水，祛皱，嫩肤，适用对象是缺水、干燥肌肤修护，上市时间是2013，颜色是银白，产品规格是立式，毛重是45kg，功率是800w