

威海华诚医疗,导尿管,厂家供应一次性导尿管

产品名称	威海华诚医疗,导尿管,厂家供应一次性导尿管
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:ZR1110
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

产品详情

插管时机：护理人员应熟悉掌握气囊尿管的结构性能，特点及使用的注意事项，正确掌握留置气囊导尿的方法和拔管方法，向气囊内注入液体时推注速度要慢，有阻力或患者有疼痛时立即停止注入，并抽吸已注入的液体，重新调整尿管的深度后再注入液体，拔管时先抽吸完气囊内的液体再拔管。

插管过程中遇到阻力不能前进时，不应盲目插入，特别是患者患有前列腺肥大的老年患者，由于尿道粘膜弹性差，比较薄脆，稍有不慎就容易引起尿道粘膜破裂，此时应选择型号较小较坚韧的尿管为佳，自尿道口向尿道内注入石蜡油起润滑作用，利多卡因粘膜麻醉可以减少疼痛以及疼痛反射所致的尿道括约肌痉挛，以利插管成功。

注意：男性尿道解剖特点及常见的尿道异常：长约17-20cm，直径：平均约为8mm

三个狭窄部：外口、膜部、内口 三个膨大部位：舟状窝、球部、前列腺部

二个弯曲：尿道膜部——耻骨下弯，耻骨前弯曲。

操作时，当把阴茎向前与向腹壁拉提时，耻骨前弯曲即消失，但耻

骨下弯曲不能人为的改变，故导尿管达此弯曲时应轻柔插入，防止操作粗暴而引起尿道损伤。