

# 带遥控成人心肺复苏训练模拟人

产品名称	带遥控成人心肺复苏训练模拟人
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH-CPR480S-G
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

## 产品详情

[产品名称：高级电脑心肺复苏训练模拟人（RF遥控器），带遥控心肺复苏心肺复苏模拟人](#)  
[型号：ZH-CPR480S-G](#)

产品介绍:

ZH/CPR480S-G高级电脑心肺复苏训练模拟人结合2010国际心肺复苏标准，产品功能全面升级。强化胸外按压的重要性，更加符合现实临床CPR操作要求。

执行标准：美国心脏学会（AHA）2010国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

材料特点：

模拟人的脸皮面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。CPR模拟人功能：

模拟人上肢关节可自由活动。 新增设备故障自检功能：开机后，设备自动进入自检程序，检查设备是否有故障，如有故障，语音提示用户及时维护。

按键操作采用容错技术，并有语音提示按键操作错误，避免用户误操作。

新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户。 新增“暂停”按键，暂停当前的操作。

模拟生命体征：1) 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

2) 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

3) 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。可进行标准气道开放指示灯显示。

可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。

三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

1) 方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。2) 方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2010国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作，老师可自行设定操作时间范围。3) 方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2010年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围。

CPR显示屏功能：

1) 电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和胸外按压的正确次数和错误次数。

2) 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可调节音量大小功能。

3) 条形码显示吹气量：正确的吹气量为500/600ml-1000ml。4) 吹气量过少时，条形码为黄色。

5) 吹气量合适时，条形码为绿色。6) 吹气量过大时，条形码为红色。

条形码显示按压深度，正确的按压尝试5cm以上。1) 按压深度过少时，条形码为黄色。

2) 按压尝试合适时，条形码为绿色。可设定操作时间，以秒为单位。

操作频率：100次/分以上。电源状态：采用220V电源，经过稳定器稳压后输出电源6V。

打印机功能：可选择操作结束后打印长/断条成绩单操作过程。成绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。RF遥控器功能：RF遥控器：老师可通过遥控器控制CPR开始、停止、复位、训练、考核、实战、操作时间、音量调节、打印长/断条成绩单功能。

标准套配置：高级心肺复苏模拟人一具；高级电脑显示器一台；RF遥控器一个；

豪华手拉推式人体硬塑箱一只；复苏操作垫一条；一次性消毒面膜(50张/盒)一盒；

可更换面皮一只；可换肺气袋五个；热敏打印纸二卷；

急救操作手册一套；使用说明书一份；

产品保修卡、产品合格证；

友情提示： 您只要致电：021-64049756 021-64049758 021-64049751

我们可以帮您推荐符合您要求的高级电脑心肺复苏训练模拟人ZH/CPR480S-G相关产品！