

## 胸外按压急救模拟人，急救训练假人模型

产品名称	胸外按压急救模拟人，急救训练假人模型
公司名称	上海中弘科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中弘科教 型号:ZH-CPR690
公司地址	上海市松江区中辰路225号-11
联系电话	021-64049756 13661681239

## 产品详情

企业介绍：<http://www.shzhonghong.com/about.html>

公司网址1：<http://www.shzhonghong.com>

公司网址2：<http://www.shzhonghong8.com>

产品网址：[http://www.shzhonghong.com/model/List\\_12\\_4.html](http://www.shzhonghong.com/model/List_12_4.html)

公司联系方式：021-64049756 64049658

公司联系手机：13916333768 13661681239

公司QQ:519497139 QQ:973331252 QQ:1550879403

产品名称：高级大屏幕液晶彩显电脑心肺复苏模拟人，胸外按压急救模拟人，急救训练假人模型

型号：ZH-CPR690

产品介绍:

中弘科教ZH/CPR690高级大屏幕液晶彩显电脑心肺复苏模拟人，急救人体模型人采用最新国际2010指南标准，全程语音与文字提示，监测各种操作指数、考核及打印等功能。该产品功能进行全面升级，采用全液晶屏显示。突出CPR训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值。更加符合临床和教学练习CP

R操作要求。执行标准：美国心脏学会(AHA)2010国际心肺复苏(CPR) & 心血管急救(ECC)指南标准

功能特点：采用8英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。

模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 模拟生命体征：

- 1) 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。
- 2) 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
- 3) 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
- 4) 瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

可进行人工呼吸和心脏胸外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

操作方式：CPR训练操作、考核操作（模式考核、实战考核）

- 1) 操作方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练操作。
- 2) 操作方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2010CPR标准，正确有效30次按压及2次人工吹气，30：2的比例，完成五个循环周期操作。
- 3) 操作方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。控制器显示屏功能：电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和心脏胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

语音提示：训练和考核全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

文字提示：训练和考核全程中文文字提示。

动态条码指示灯显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

- 1) 吹气量过少时，条形码为黄色。
- 2) 吹气量合适时，条形码为绿色。
- 3) 吹气量过大时，条形码为红色。
- 4) 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

动态条形码指示灯显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

- 1) 按压深度不够时（小于5cm），条形码为黄色。
- 2) 按压深度正确时（5-6cm区域），条形码为绿色。
- 3) 按压深度过深时（大于6cm），条形码为红色。 可自行设定操作时间，以秒为单位。

操作频率：最新国际标准，至少100次/分；也可自行设定数值。 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）成绩打印功能：

操作结束后打印操作过程。成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。材料特点：模拟人面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。标准套配置：

高级复苏全身人体模型一具； 高级显示控制器一台； 豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

复苏操作垫一条； 电源适配器一根； 数据线一根； CPR消毒面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置四套； 可换面皮一只； 热敏打印纸二卷； 2010国际最新操作指南光盘1盘；

现场急救常用技术使用手册1本； 使用说明书一本； 保修卡、合格证；

中弘系列产品： 高级大屏幕液晶彩显自动全电脑心肺复苏模拟人

高级小屏幕液晶自动电脑心肺复苏模拟人

高级移动显示自动电脑心肺复苏模拟人

高级计算机控制电脑心肺复苏训练模拟人

高级电脑心肺复苏模拟人带IC卡管理软件

高级多功能护理急救训练模拟人（心肺复苏、导尿功能）

高级全功能急救训练模拟人（心肺复苏与血压测量功能）

高级自动电脑心肺复苏模拟人

高级自动电脑心肺复苏训练模拟人

高级婴儿心肺复苏训练模拟人

高级儿童心肺复苏训练模拟人

高级半身心肺复苏训练模拟人

电子人体气管插管训练模型

男女性全功能护理人训练模型

友情提示：您只要致电：021-64049756 021-64049758 021-64049751

我们可以帮您推荐符合您要求的高级大屏幕液晶彩显电脑心肺复苏模拟人ZH/CPR690相关产品！