

## 天翔疝气托成人型/儿童型——（方便操作）

产品名称	天翔疝气托成人型/儿童型——（方便操作）
公司名称	郑州天翔医疗器械有限公司
价格	38.00/个
规格参数	品牌:天翔 产品类别:疝气托 部位:腰部
公司地址	郑州高新区渠瑞一路路南
联系电话	13613805222 13333854999

## 产品详情

品牌	天翔	产品类别	疝气托
部位	腰部	电源方式	不需要
工作方式	非电动	产地	北京
箱装数量	40	加印LOGO	可以
送礼用途	其他	适用送礼对象	其他
适用送礼场合	展销会、其他		

特点：方便操作、经济实用

天翔疝气托根据中医学理论的经络学说“内病外治”原理，并结合现代物理学力学概念及扣压机理，经科研人员反复多次实验，精心研制而成。天翔疝气托设计合理,安全,稳定,实用，既使用方便又不影响生活起居，实属国内首创。

天翔疝气托首先起到一种机械物理作用，托住疝突出物，使疝突出物不再反复突出，在此条件下，通过微血管舒缩力,激活肌细胞循环，促使细胞生长，使疝破裂口增厚，增强抗压韧性，从而进一步改善人体平衡的作用，完全改善局部血液循环，使肌肉韧带等软组织逐渐恢复功能。给广大疝气患者带来福音。

使用方法：

- 1,去掉密闭塑料袋，将疝包按疝气脱出部位放入疝气托内。
- 2,轻柔使疝气脱出物回复到腹腔，然后穿戴上。使用期限成人：每30天更换一只疝气固定带，每15天更

换一次疝包。

注意事项：

- 1,切忌系得特别过紧，若佩带过紧引起皮肤不通风引起的磨伤红斑,水疱,痱子等，应立即调整腰带松紧度，严重时可停戴，待无上述症状再戴。如必须要戴可在皮肤上搽上无极膏之类清凉剂。
- 2,切忌用水等冲洗疝气头，以免影响治疗效果。
- 3,晚间休息时，可系下疝气托（带）或继续佩戴。
- 4,防止便秘,着凉,长期咳嗽,身体持重及用力过猛等，咳嗽时用手压住疝气头，以防疝内容物下滑。
- 5,疝气痊愈后，切忌干重活。

适用范围：

腹股沟直疝，腹股沟斜疝,股疝,切口疝。属中医的小肠气,气疝,狐疝等范畴。疝气患者的辅助治疗和康复作用，对手术复发疝,双侧疝及年老体弱患者,小儿更为适宜。