

天翔电子体温计——快速精确测量

产品名称	天翔电子体温计——快速精确测量
公司名称	郑州天翔医疗器械有限公司
价格	13.00/个
规格参数	品牌:天翔 产品类别:体温计 部位:体温
公司地址	郑州高新区渠瑞一路路南
联系电话	13613805222 13333854999

产品详情

品牌	天翔	产品类别	体温计
部位	体温	电源方式	不需要
工作方式	非电动	产地	北京
箱装数量	50	加印LOGO	可以
送礼用途	广告促销、其他	适用送礼对象	长辈、儿童、客户、老年人、领导、男士、女士、朋友、青年、情侣、少年、同事、同学、外国人、晚辈、下属、婴孩、中年人、其他
适用送礼场合	展销会、其他		

技术参数

操作环境：5 ~ 35 ， 20% ~ 80%rh

测量范围：32 ~ 42

测量温度低于32 时显示l

测量温度高于42 时显示h

测量精度：±0.1 （ 35 ~ 39 ）

±0.2 （ 小于35 或大于39 ）

电源电压：dc1.5v（Ir/sr41型纽扣电池一个）

功耗：工作状态下为0.15毫瓦

电池寿命：约1年（以1天使用10分钟计算）

附件：收藏盒，使用说明书

生理效应：本产品在使用过程中，对人体无毒，无刺激，无致敏等不良反应。

贮运条件：包装后贮存5 ~55 ℃，湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

使用方法：

- 1、使用前，应先用酒精对体温计感温头进行消毒。
- 2、按压开关键蜂鸣器会发出蜂鸣声，而且显示屏会显示188.8 ℃，时间约2秒钟。
- 3、随后，显示屏显示上次测量的温度，37.0 ℃，并持续2秒钟左右，接着显示屏无显示，如此时室温高于32 ℃，则显示室温，“℃”符号闪烁，表示体温计已处于待测状态。在“℃”符号闪烁停止前放入探测部位测温。
- 4、将体温计感温头放入测量部位，显示屏就会显示35.5 ℃，显示出温度逐渐上升，同时“℃”符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则“℃”符号停止闪烁，同时发出蜂鸣提示声，显示37.2 ℃时表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的体温值。
- 5、测量结束后，按压开关键，关闭电源。如没有按压开关键关闭电源，9分钟左右后将自动关机。